

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

02-28376

No. 111228

納入先	新鋭工業（株）東京支店 殿		機種	ONW-10
所在地	埼玉県鴻巣市本町6-5-18		機番	000710
ユーザー名	こうのす共生病院 様		納入日	平成16年10月29日
点検者	中澤一裕	作業時間	受付日	平成23年10月12日
返送先	納入先と同じ		発送日	平成23年12月26日

修理依頼・異常内容

残り時間ランプ「18」が点滅

不具合原因（故障箇所）と処置

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

「18」の点滅につきまして

洗浄終了後も水槽に水が残っていると「18」が点滅して排水動作をします。

点検したところ、排水ポンプの性能劣化と排水配管の詰まりでこの現象が起きていたのでポンプの交換と排水系統の掃除を実施しました。

定期交換部品につきまして

酸素発生装置の部品交換時期を経過しておりますので、運転するときは

オゾンインジケータをご使用いただき、変色が悪くなったら早めに交換をご依頼ください。



[2] 修理・点検内容

1. 部品交換及び清掃（下表と写真をご参照ください）

2. オゾン水濃度測定：0.39～0.41 mg/L・・・正常

3. PSA（酸素発生装置）性能点検・・・次回要交換

酸素濃度：89.3% 酸素流量：0.77 L/min 圧力：0.122～0.212 MPa

4. 運転確認 異常なし。オゾンインジケータ変色 異常なし。

—以上—

承認



審査



作成

H23.12.28

中澤

交換部品

部品コード	部品名称	数量	備考
	排水ポンプ（P-3）	1	
	排水シリコンチューブ	1	