

池田 7/1 = 7/ 御中

点検確認書

株式会社 IHI シバウラ
環境事業部

点検担当者: 岸 半

点検年月日	平成24年 1 月 16 日	機種名	ONW-10	製造機番	775
設置場所				TEL:	
設置時期		使用時間		御対応者	

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常	☒	交換	☐
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐
ランプ類				
操作パネル	正常	☒	交換	☐
蛍光灯	正常	☒	交換	☐
洗浄動作				
フタロック	正常	☒	調整	☐
給水	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 エアバージ	正常	☒	調整	☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐
排水	正常	☒	調整	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐
性能確認				
オゾン水濃度	正常	☒	濃度: 0.5 mg/L	
オゾンインジケータ	正常	☒		
酸素発生	正常	☒	濃度: 92.2% 流量: 0.80 L/min 圧力: 0.105~0.177 MPa	
水漏れ確認				
装置外	正常	☒	調整	☐
装置内	正常	☒	調整	☐
清掃				
外装	正常	☐	清掃	☒
内部	正常	☐	清掃	☒
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐

交換部品	数量	コメント
吸着筒	一式	機械作動等問題なし
吸湿筒	一式	
ドレン用フィルタ	一個	
オゾン分解触媒	一個	

池田 新鋭工業(株)
TEL 043-293-7711 FAX 043-293-7712

年 月 日

ご署名

池田 政夫 (印)

※: 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

内視鏡洗浄機 作業チェックリスト

株式会社IHIシバウラ
環境事業部

日付: 1月16日

作業者: 山手

ONW-10機番: 775

PSA機番: SPS-1666/

客先: 34田71277

様

定期交換部品		
吸着筒と吸湿筒を交換したか (取り外したPSA機番を記入 SPS-16662)	(合) 否	
ドレン用フィルターを交換したか	(合) 否	
排水シリコンチューブを交換したか	(合) 否	
オゾン分解触媒を交換したか	(合) 否	
配管チューブは確実に奥まで差し込んだか 再確認のこと	(合) 否	
取付ボルトの締め忘れ・ガタはないか? 確実に取り付いているか	(合) 否	
PSA性能確認		
圧力スイッチのゼロ点は合っているか (±0.005Mpa以内)	(合) 否	
酸素濃度の確認(運転開始から約3分後) (90%以上) (92.2 %)	(合) 否	
酸素流量は適切か(0.73~0.82L/min) (0.80 L/min)	(合) 否	
PSA圧力の確認 (0.165 Mpa) ~ (0.179 Mpa)	参考値	
外装の取付		
オゾンセンサーは配線したか	(合) 否	
フロントパネルのランプは配線したか	(合) 否	
フロントパネルとサイドパネルの隙間は均等か	(合) 否	
ドレンチューブは接続したか	(合) 否	
確認事項		
フタパッキンに剥がれはないか	(合) 否	
内視鏡接続コネクタのパッキン、Oリングは正常か	(合) 否	
洗浄槽・排水パイプ、下部フィルタは清掃したか(汚れある場合清掃)	(合) 否	
定期メンテナンスシールに点検日を記入したか	(合) 否	
定期点検カウンタをリセットしたか(フィルタリセットスイッチ20秒長押し)	(合) 否	
別紙 点検確認書に記録したか	(合) 否	
確認試験		
オゾン水温度の確認(オゾン水インジケータで0.3mg/L以上)	(合) 否	
運転は正常か、エラーはでないか	(合) 否	
インジケータの変色は良好か	(合) 否	
不具合内容・特記事項 (否の場合、Noと共に理由を記入)		