

点検確認書

株式会社 IHIシバウラ
環境事業部

点検担当者: 渡 辺

点検年月日	平成24年1月11日	機種名	ONW-10	製造機番	1068
設置場所	さいたま市南区文蔵2-30-14			Tel:	048-872-0014
設置時期	平成 年 月 日	使用時間		御対応者	

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常	☒	交換	☐
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐
ランプ類				
操作パネル	正常	☒	交換	☐
蛍光灯	正常	☒	交換	☐
洗浄動作				
フタロック	正常	☒	調整	☒
給水	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐
排水	正常	☒	調整	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐
性能確認				
オゾン水濃度	正常	☐	濃度:	mg/L
オゾンインジケータ	正常	☒		
酸素発生	正常	☐	濃度: 88.6	流量: 7.2 L/min 圧力: 0.4~1.5 MPa
水漏れ確認				
装置外	正常	☒	調整	☐
装置内	正常	☒	調整	☐
清掃				
外装	正常	☒	清掃	☐
内部	正常	☒	清掃	☐
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐

交換部品	数量	コメント
吸着筒	一式	
吸湿筒	一式	
ドレン用フィルタ	一個	
オゾン分解触媒	一個	

平成24年1月11日

〒330-0025 埼玉県さいたま市南区文蔵2-30-14
ご署名 大石医院 印※: 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。
TEL 048-872-0014 FAX 048-872-0017

内視鏡洗浄機 作業チェックリスト

株式会社 IHI シバウラ

環境事業部

日 付: 2012.1.1 作業者

ONW-10機番: 1068 PSA機番: SPS-10972 客先: 大石医院 様

定期交換部品	
吸着筒と吸湿筒を交換したか (取り外したPSA機番を記入 SPS-10156)	合/否
ドレン用フィルターを交換したか	合/否
排水シリコンチューブを交換したか	合/否
オゾン分解触媒を交換したか	合/否
配管チューブは確実に奥まで差し込んだか 再確認のこと	合/否
取付ボルトの締め忘れ・ガタはないか? 確実に取り付いているか	合/否
PSA性能確認	
圧力スイッチのゼロ点はあっているか ($\pm 0.005\text{Mpa}$ 以内)	合/否
酸素濃度の確認(運転開始から約3分後) (90%以上) (88%) ?	合/否
酸素流量は適切か ($0.73 \sim 0.82\text{L/min}$) 0.73 (0.75 L/min)	合/否
PSA圧力の確認 (0.8Mpa) ~ (1.53Mpa)	合/否
外装の取付	
オゾンセンサーは配線したか	合/否
フロントパネルのランプは配線したか	合/否
フロントパネルとサイドパネルの隙間は均等か	合/否
ドレンチューブは接続したか	合/否
確認事項	
フタパッキンに剥がれは無い	合/否
内視鏡接続コネクタのパッキン、Oリングは正常か	合/否
洗浄槽・排水パイプ、下部フィルターは清掃したか (汚れのある場合清掃)	合/否
定期メンテナンスシールに点検日を記入したか	合/否
定期点検カウンターをリセットしたか (フィルターリセットスイッチ20秒長押し)	合/否
別紙 点検確認書に記録したか	合/否
確認試験	
オゾン水濃度の確認(オゾンインジケータで 0.3mg/L 以上)	合/否
運転は正常か、エラーはでないか	合/否
インジケータの変色は良好か	合/否
PSAカウンタ 1 回	
PSA2hカウンタ 1 回	
総洗浄回数 568 回	
定期点検用洗浄カウンタ 1 回	

不具合内容・特記事項 (否の場合、NOと共に理由を記入)