

点検確認書

株式会社 IHIシパウラ
環境事業部

点検担当者： 渡 辺

点検年月日	平成24年1月16日	機種名	ONW-10	製造機番	1586
設置場所	佐野市植上町1677			TEL	0283-22-5358
設置時期	平成22年4月6日	使用時間		御対応者	

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源錠	正常	☒	交換	☐
フィルタリセット錠	正常	☒	交換	☐
運転/停止錠	正常	☒	交換	☐
アルコールモード錠	正常	☒	交換	☐
ランプ類				
操作パネル	正常	☒	交換	☐
蛍光灯	正常	☒	交換	☐
洗浄動作				
フタロック	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
給水	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
排水	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
性能確認				
オゾン水濃度	正常	☒	濃度:	mg/L
オゾンインジケータ	正常	☒		
酸素発生	正常	☒	濃度: 0.9%	流量: 0.8 L/min 圧力: 0.2-1.5 MPa
水漏れ確認				
装置外	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
装置内	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
清掃				
外装	正常	☒	清掃	☐
内部	正常	☒	清掃	☐
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐

交換部品		数量	コメント
吸着筒	交換 ☒	一式	
吸湿筒	交換 ☒	一式	
ドレン用フィルタ	交換 ☒	一個	
オゾン分解触媒	交換 ☒	一個	
H24年1月16日			
ご署名 初谷 和子 印			

※：本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。



日 付: 2012.1.16 作業者

ONW-10機番: 1586 PSA機番: SPS-10972 客先: 佐野医師会病院 様

定期交換部品	
吸着筒と吸湿筒を交換したか (取り外したPSA機番を記入 SPS-1699)	合/否
ドレン用フィルターを交換したか	合/否
排水シリコンチューブを交換したか	合/否
オゾン分解触媒を交換したか	合/否
配管チューブは確実に奥まで差し込んだか 再確認のこと	合/否
取付ボルトの締め忘れ・ガタはないか? 確実に取り付いているか	合/否
PSA性能確認	
圧力スイッチのゼロ点はあっているか (± 0.005 Mpa以内)	合/否
酸素濃度の確認(運転開始から約3分後) (90%以上) (92 %)	合/否
酸素流量は適切か (0.73~0.82 L/min) (0.8 L/min)	合/否
PSA圧力の確認 (82 Mpa) ~ (150 Mpa)	合/否
外装の取付	
オゾンセンサーは配線したか	合/否
フロントパネルのランプは配線したか	合/否
フロントパネルとサイドパネルの隙間は均等か	合/否
ドレンチューブは接続したか	合/否
確認事項	
フタパッキンに剥がれは無いか	合/否
内視鏡接続コネクタのパッキン、Oリングは正常か	合/否
洗浄槽・排水パイプ、下部フィルターは清掃したか (汚れのある場合清掃)	合/否
定期メンテナンスシールに点検日を記入したか	合/否
定期点検カウンターをリセットしたか (フィルターリセットスイッチ20秒長押し)	合/否
別紙 点検確認書に記録したか	合/否
確認試験	
オゾン水濃度の確認(オゾンインジケータで0.3mg/L以上)	合/否
運転は正常か、エラーはでないか	合/否
インジケータの変色は良好か	合/否
PSAカウンタ	0 回
PSA2hカウンタ	2 回
総洗浄回数	1814 回
定期点検用洗浄カウンタ	1192 回

不具合内容・特記事項 (否の場合、NOと共に理由を記入)