

神奈川県水処理技術協会御中

点検確認書

株式会社 IHIシパウラ
環境事業部

点検担当者: 岸平

点検年月日	平成24年	1月30日	機種名	ONW-10	製造機番	1156
設置場所					TEL:	
設置時期			使用時間		御対応者	

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常	☒	交換	☐
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐
ランプ類				
操作パネル	正常	☒	交換	☐
蛍光灯	正常	☒	交換	☐
洗浄動作				
フタロック	正常	☒	調整	☐
給水	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐
排水	正常	☒	調整	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐
性能確認				
オゾン水濃度	正常	☒	濃度: 0.5 mg/L	
オゾンインジケータ	正常	☒		
酸素発生	正常	☒	濃度: 92.2% 流量: 0.8 L/min 圧力: 0.102~0.103 MPa	
水漏れ確認				
装置外	正常	☒	調整	☐
装置内	正常	☒	調整	☐
清掃				
外装	正常	☐	清掃	☒
内部	正常	☐	清掃	☒
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐

交換部品	数量	コメント
吸着筒	一式	水位センサー清掃実施。
吸湿筒	一式	
ドレン用フィルタ	一個	
オゾン分解触媒	一個	

年 月 日

ご署名

※: 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

内視鏡洗浄機 作業チェックリスト

株式会社IHIシバウラ

環境事業部

日付: 2012.1.30

作業者: 幸年

ONW-10機番: 1156

PSA機番: SPS-1096/

客先: 神奈川県予防衛生協会 様

定期交換部品

吸着筒と吸湿筒を交換したか (取り外したPSA機番を記入 SPS-1096/)	☒ 合 / 否
ドレン用フィルターを交換したか	☒ 合 / 否
排水シリコンチューブを交換したか	☒ 合 / 否
オゾン分解触媒を交換したか	☒ 合 / 否
配管チューブは確実に奥まで差し込んだか 再確認のこと	☒ 合 / 否
取付ボルトの締め忘れ・ガタはないか? 確実に取り付いているか	☒ 合 / 否

PSA性能確認

圧力スイッチのゼロ点は合っているか ($\pm 0.005\text{Mpa}$ 以内)	☒ 合 / 否
酸素濃度の確認(運転開始から約3分後)(90%以上)	(92.2 %) ☒ 合 / 否
酸素流量は適切か(0.73~0.82L/min)	(0.81 L/min) ☒ 合 / 否
PSA圧力の確認	(0.102 Mpa) ~ (0.185 Mpa) 参考値

外装の取付

オゾンセンサーは配線したか	☒ 合 / 否
フロントパネルのランプは配線したか	☒ 合 / 否
フロントパネルとサイドパネルの隙間は均等か	☒ 合 / 否
ドレンチューブは接続したか	☒ 合 / 否

確認事項

フタパッキンに剥がれはないか	☒ 合 / 否
内視鏡接続コネクタのパッキン、Oリングは正常か	☒ 合 / 否
洗浄槽・排水パイプ、下部フィルタは清掃したか(汚れある場合清掃)	☒ 合 / 否
定期メンテナンスシールに点検日を記入したか	☒ 合 / 否
定期点検カウンタをリセットしたか(フィルタリセットスイッチ20秒長押し)	☒ 合 / 否
別紙 点検確認書に記録したか	☒ 合 / 否

確認試験

オゾン水濃度の確認(オゾン水インジケータで0.3mg/L以上)	☒ 合 / 否
運転は正常か、エラーはでないか	☒ 合 / 否
インジケータの変色は良好か	☒ 合 / 否

不具合内容・特記事項 (否の場合、Noと共に理由を記入)

インジケータの変色は悪いという事で吸着、吸湿筒交換。