

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

No. 110609

配布先	客先	納入先	新鋭工業株式会社 東京支店 殿		機種	ONW-10	
環境	防品	所在地	東京都目黒区東山1-10-13		機番	000532	
		ユーザー名	中目黒消化器クリニック 様		納入日	平成16年10月28日	
		点検者	中澤一裕	作業時間	受付日	平成22年11月10月	
計	3	返送先	納入先と同じ		出荷日	平成23年6月8日	

修理依頼・苦情内容

排水異常修理および定期点検

不具合原因（故障箇所）と処置予定

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

排水システムの分解点検の結果、排水ポンプ内にプラスチック片が詰まっていた（写真1）
この詰まりが原因でポンプの性能が低下して異常が発生しました。

写真1：排水ポンプ内のプラスチック片



写真2：交換部品



[2] 修理・点検内容

- 部品交換：下表と写真をご参照ください。
- オゾン水濃度測定：0.49～0.53mg/L・・・正常
- PSA（酸素発生装置）性能点検・・・正常
酸素濃度：93.8% 酸素流量：0.79 L/min 圧力：0.086～0.152MPa（AC100V、50Hz）
- 運転動作確認・・・正常
- オゾンインジケータ変色・・・正常
- 運転カウンタ・・・6062回

—以上—

承認



審査



作成

H23.6.9

中澤

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
	PSA 吸着筒、吸湿筒	1式	
	ドレンフィルター	1	
	オゾン分解触媒	1	
	排水ポンプ（P-3）	1	
	水位レベルセンサー	1式	無償

（株）IHIシバウラ