

第二臨海クリニック 御中

点検確認書

2/16 岡山工場受付
定期交換部品 交換依頼

株式会社 IHIシバウラ
環境事業部

点検担当者： 中澤一裕



点検年月日	平成 24 年 2 月 22 日	機種名	ONW-10	製造機番	:001360
設置場所	東京都江戸川区西葛西 7-28-8			TEL	: 03-5658-3558
設置時期	平成 19年 2月 15日	運転回数	1781	御対応者	

点検項目		点検結果			
スイッチ類					
電源釦	正常	☒	交換	☐	
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐	
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐	
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐	
ランプ類					
操作パネル	正常	☒	交換	☐	
蛍光灯	正常	☒	交換	☐	
洗浄動作					
フタロック	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
給水	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
排水	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
性能確認					
オゾン水濃度	正常	☒	濃度：0.54 mg/L		
オゾンインジケータ	正常	☒			
酸素発生	正常	☒	濃度：95.3 % 流量：0.82 L/min 圧力：0.089~0.147 MPa		
水漏れ確認					
装置外	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
装置内	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
清掃					
外装	正常	☒	清掃	☐	
内部	正常	☒	清掃	☒	排水ホース
洗浄コネクタ	} 未実施	正常	☐	調整	☐
洗浄チューブ		正常	☐	調整	☐
				交換	☐
				交換	☐

交換部品			数量	コメント
吸着筒	交換	☒	1 式	異常ありませんでした。 定期交換部品について 取説の一部を添付いたします。
吸湿筒	交換	☒	1 式	
ドレン用フィルタ	交換	☒	1 個	
オゾン分解触媒	交換	☒	1 個	
吸盤	交換	☒	2 個	
	交換	☐		

平成 24 年	月	日
ご署名		印

※：本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

オゾン水内視鏡洗浄機 ONW-10 点検写真

平成24年2月27日
管理No. 20120227-4

写真1: 製造銘板



写真2: 定期点検シール


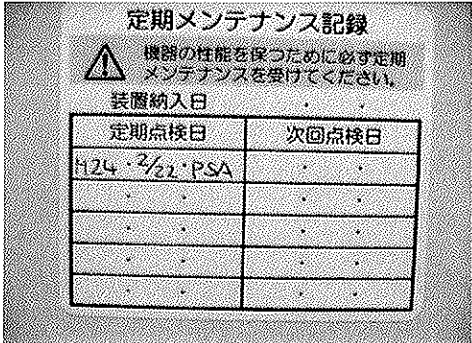


写真3: 定期交換部品 一式

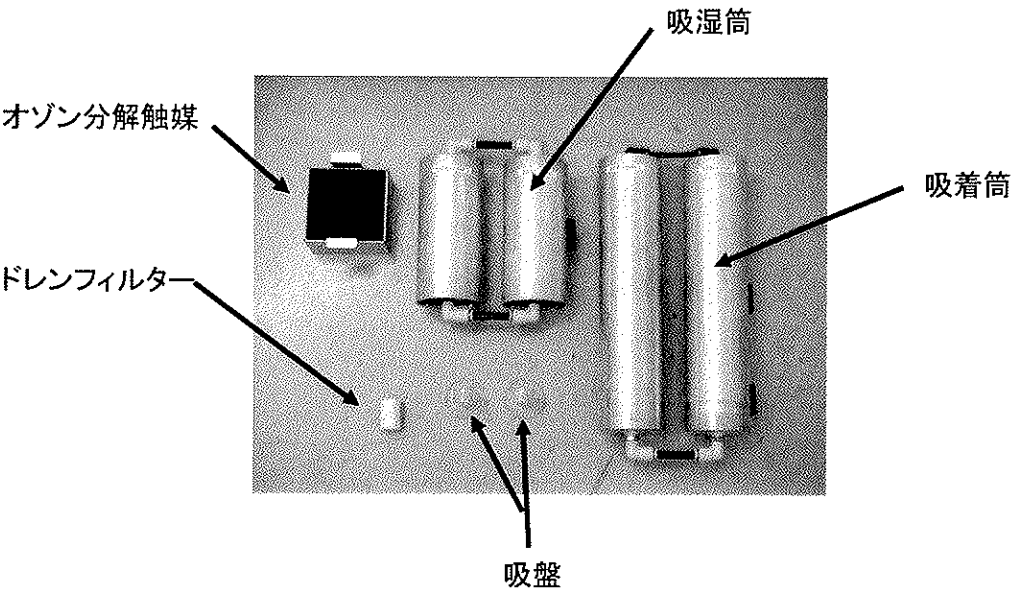


定期交換部品

部 品 名	交 換 時 期
オゾン分解ユニット, ドレントラップフィルタ	1年間もしくは1,500回処理のどちらか短い方
吸着筒・吸湿筒	2年間


1500回処理に達した場合フィルタランプが点灯してお知らせします。

上記はあくまでも必須交換時期の目安であって、ご使用の場所、状態、運転、時間によって変わることがあります。また、異常ランプが点灯したり、背面スリットからオゾン臭を感じたら、販売店に連絡し、点検を依頼してください。


オゾン分解ユニット……………1個

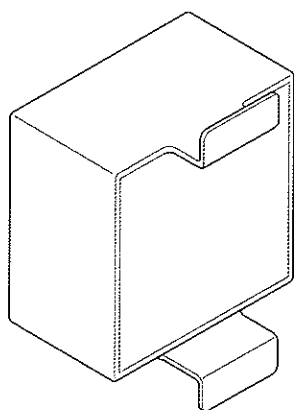


ドレントラップフィルタ……………1個

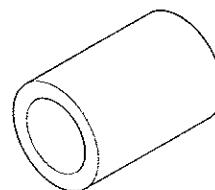

吸着筒……………1セット

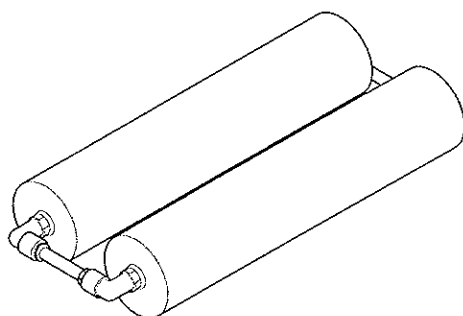

吸湿筒……………1セット

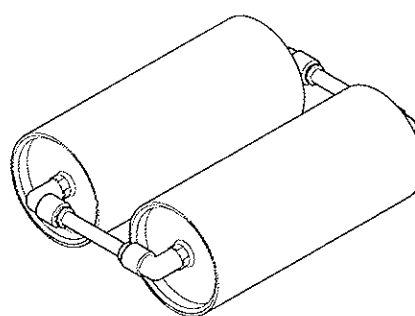

●交換はサービスマンに依頼してください。