

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

02-32550

No. 120302

配布先	客先	納入先	新鋭工業株式会社 東京支店 殿		機種	OED-1000
環境	環品	顧客名	麻見江ホスピタル 様		機番	100069
		所在地	埼玉県比企郡鳩山町大橋 1066		納入日	平成 22 年 11 月 6 日
		点検者	中澤一裕	作業時間	受付日	平成 24 年 2 月 23 日
計	3	返送先	納入先と同じ		出荷日	平成 24 年 3 月 1 日

修理依頼・不具合内容

タッチパネルを触れても画面が点灯しない。（運転操作不能）

不具合原因（故障箇所）と処置予定

〔1〕点検結果（不具合箇所と不具合原因）

タッチパネルに通電しても起動しないことを確認しました。
内部回路の故障と断定し、メーカーに送付して調査を依頼いたしました。
調査結果が届き次第ご報告いたします。

〔2〕修理・点検内容

- 1：タッチパネル交換
- 2：性能確認・・・正常 酸素流量：0.8L/min、オゾン水濃度計パルス：576
- 3：運転確認・・・正常 殺菌履歴：0.71ppm
- 4：出荷時の装置情報
前回定期交換日：2011/11/16 運転プログラム：Ver0103/T01.A
交換後運転回数：3 殺菌：2、殺菌＋アルコール：1、リークチェック：2
自己洗浄：2、アルコール単独：0、エア単独：2

—以上—

承認

江
24.3.-2
口

審査

江
24.3.-2
口

作成

H24.3.2
中澤

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
	タッチパネル	1	無償

（株）IHIシバウラ

岡山県岡山市東区西大寺新地170-6 TEL:086-944-6528