

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20120227
発行日 平成 24 年 2 月 27 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100113
作業年月日	平成 24 年 2 月 23 日		作業時間:	2.5 Hr
顧客名	高戸橋クリニック 御中		TEL:	03-3200-3060
所在地	東京都新宿区高田馬場2-5-24		担当	様
販売店	今回無償		担当	様
納入年月日	平成 22 年 6 月 23 日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品 トレー、コード、給排水ホース
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 2 回目	定期点検シール記入 ☒		
出張 (引取)	修理 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
岡山工場にて点検依頼。			
特に内視鏡を洗えているか、水槽内の水流、ノズルをチェックすること。			
不具合原因、作業内容			
下の点検項目を実施。 参考用に別紙写真を添付しました。			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 358
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☐ 未実施
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐
作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項			
異常ありませんでした。また水流、ノズルの状態も問題ありませんでした。			
【お知らせ】2012年分の定期交換部品の交換時期が6月28日です。			

装置 情報	交換後運転回数: 535	更新 (リセット) 実施 (未実施)	殺菌: 1465	殺菌+7L: 260
	リークチェック: 6	自己洗浄: 4	アルコール単独: 89	エア単独: 305

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	

お客様ご確認署名欄		年	月	日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。				
ご署名			印	

修理業者 株式会社 IHI シバウラ 岡山事業所
岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6
TEL: 086-944-6528

責任技術者	作業者
中澤 24.2.27	中澤 24.2.27