

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
点検結果をご報告申し上げますので、よろしくご査収頂き、今後とも
ご指導ご高配を賜りますよう、お願い申し上げます。

敬具

出張（点検）報告書

修理依頼 番号		No. 120201
------------	--	------------

配布先	出張場所	東京都新宿区高田馬場 高戸橋クリニック様		機種	OED-1000	
客先	1	電話	03-3200-3060		機番	100113
環営	1	納入先	新鋭工業（株）東京支店 殿		納入日	平成22年6月23日
環品	1	点検者	(株) IHIシバウラ	中澤一裕	出張日	平成24年1月26日
		出張目的・不具合内容				
計	3	平成24年1月24日新鋭工業殿より以下の内容の連絡があり、調査のため出張した。 OED-1000を使って鉗子を洗い、ハンガーにかけたら床に青い液（インジゴ？） がたれている。				
		作業内容・作業結果				
		1：鉗子につきまして 販売時のご説明が不十分であり、大変申し訳ありませんでした。 OED-1000取扱説明書に記載していますが、殺菌不足のおそれがありますので 消化管用軟性内視鏡以外には使用しないでください。				
		2：作業内容 ・前回定期点検日確認：平成23年6月28日 ・定期点検後～現在までの運転回数：526回 ・異常履歴確認：1/24 8:37 光量低下異常1 (E:210)				
		3：作業結果 機械は異常ありませんでした。 異常履歴にある「光量低下異常1」はオゾン水濃度計の紫外線ランプの光量が低下 した時に発生します。たまたま紫外線ランプの点灯に時間がかかり、この異常が 発生したものと思われますので、様子を見てくださいますようお願いいたします。				
承認	—以上—					
江 24.2.-1 口						
審査						
江 24.2.-1 口						
作成	交換部品					
H24.2.1 中澤	部品番号	部品名称	数量	備考		
		なし				