

管理 No.

保守点検・修理 報告書

発行日 平成23年 6月 6日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100195
作業年月日	平成23年 6月 6日		作業時間:	1.5 Hr
顧客名	中央杯間病院 様		TEL:	046-275-0110
所在地	神奈川県 大和市 中央杯間 4-14-18		担当	松島主任 様
販売店	MMコーポレーション		担当	様
納入年月日	平成22年 10月 7日	保証期間	内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	年 回目	定期点検シール記入 ☐
☒ 出張・ ☐ 引取	修理 ☐			修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

※定期メンテナンス 1回目

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☐	殺菌槽 LED	正常 ☐
酸素ライン	正常 ☐	エアライン	正常 ☐
アルコールライン	正常 ☐	オゾン水濃度計動作	正常 ☐ 回数数 604
オゾンセンサ	正常 ☐	排水栓、排水ライン	正常 ☐
給水ライン	正常 ☐	細管送水ライン	正常 ☐
濃度計流量	正常 ☐	排気ライン	正常 ☐
水位センサー	正常 ☐	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.6 ppm
水漏れ確認	正常 ☐	異常音、振動	正常 ☐
清掃	正常 ☐ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☐
トレー	正常 ☐	殺菌チューブ類	正常 ☐
殺菌槽コネクタ	正常 ☐		正常 ☐

作業結果(完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

殺菌問題無し 次回424.6から150回どちらかで交換!

装置情報	交換後運転回数: 1565 更新(リセット)実施・未実施	殺菌: 822	殺菌+7%: 743
	リークチェック: 735 自己洗浄: 199	7A2-6単独: 7	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾンセンサー		☒	1	オゾン濃度計		☒	1
オゾン配管		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	
濃度計ホルダー		☒	1			☐	
		☐				☐	

お客様ご確認署名欄

- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

H23 年 6 月 6 日

ご署名

若林

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL: 03-3816-0444

責任技術者

作業者

中村

