

えいせい工業 御中

点検確認書

株式会社 IIIシバウラ
環境事業部

点検担当者: 岸平

点検年月日	平成24年 3月 27日	機種名	ONW-10	製造機番	655
設置場所				TEL:	
設置時期		使用時間		御対応者	

点検項目	点検結果					
スイッチ類						
電源錠	正常	☒	交換	☐		
フィルタリセット錠	正常	☒	交換	☐		
運転/停止錠	正常	☒	交換	☐		
アルコールモード錠	正常	☒	交換	☐		
ランプ類						
操作パネル	正常	☒	交換	☐		
蛍光灯	正常	☒	交換	☐		
洗浄動作						
フタロック	正常	☒	調整	☐	交換	☐
給水	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 エアバージ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐	交換	☐
排水	正常	☒	調整	☐	交換	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐	交換	☐
性能確認						
オゾン水温度	正常	☒	温度:	0.5	mg/L	
オゾンインジケータ	正常	☒				
酸素発生	正常	☒	濃度:	90/%	流量:	0.77 L/min
			圧力:	0.094~0.170 MPa		
水漏れ確認						
装置外	正常	☒	調整	☐	交換	☐
装置内	正常	☒	調整	☐	交換	☐
清掃						
外装	正常	☐	清掃	☒		
内部	正常	☐	清掃	☒		
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐	交換	☐

交換部品		数量	コメント
吸着筒	交換 ☐	一式	フタハネ部、破損為交換実施。
吸湿筒	交換 ☐	一式	
ドレン用フィルタ	交換 ☐	一個	
オゾン分解触媒	交換 ☐	一個	
	交換 ☐		

年 月 日

ご署名 胡居 郁朗

古月

※: 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

内視鏡洗浄機 ONW-10 作業チェックリスト

株式会社HISシバウラ
環境事業部

日付: 2012年 3月 27日 作業者: 坪 平

ONW-10 機番: 655 PSA機番: SPS- 10445 客先: エム・エス・エス 様

定期交換部品	
吸着筒と吸湿筒を交換したか (取り外したPSA機番を記入 SPS-)	合/否
ドレン用フィルターを交換したか	合/否
排水シリコンチューブを交換したか	合/否
オゾン分解触媒を交換したか	合/否
配管チューブは確実に奥まで差し込んだか 再確認のこと	合/否
取付ボルトの締め忘れ・ガタはないか? 確実に取り付けしているか	合/否
PSA性能確認	
圧カスイッチのゼロ点は合っているか (±0.005Mpa以内)	合/否
酸素濃度の確認(運転開始から約3分後) (90%以上) (90.1 %)	合/否
酸素流量は適切か(0.73~0.82L/min) (0.7) L/min	合/否
コンプレッサ圧力(最大圧力0.140Mpa以上) (最低 0.094 Mpa~最大 0.170 Mpa)	合/否
外装の取付	
オゾンセンサーは配線したか	合/否
フロントパネルのランプは配線したか	合/否
フロントパネルとサイドパネルの隙間は均等か	合/否
ドレンチューブは接続したか	合/否
確認事項	
フタパッキンに剥がれはないか	合/否
内視鏡接続コネクタのパッキン、Oリングは正常か	合/否
洗浄槽・排水パイプ、下部フィルタは清掃したか(汚れある場合清掃)	合/否
定期メンテナンスシールに点検日を記入したか	合/否
定期点検カウンタをリセットしたか(フィルタリセットスイッチ20秒長押し)	合/否
別紙 点検確認書に記録したか	合/否
確認試験	
オゾン水濃度の確認(オゾン水インジケータで0.3mg/L以上)	合/否
運転は正常か、エラーはでないか	合/否
インジケータの変色は良好か	合/否
運転プログラムのバージョン確認(平成21年6月現在「10」が最新)	合/否

不具合内容・特記事項 (否の場合、Noと共に理由を記入)

フタパネ破損、為交換。