

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成24年3月30日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100088
作業年月日	平成24年3月30日		作業時間:	Hr
顧客名	181 医院 様		TEL:	0478-86-5315
所在地	千葉県香取郡東庄町新宿1054		担当	様
販売店			担当	様
納入年月日	平成 年 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	年 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ 表示数 721
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.23 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☐ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐
作業結果(完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項			
機器作動等問題なし			

装置 情報	交換後運転回数: 25	更新(リセット) <u>実施</u> 未実施	殺菌: 26	殺菌+7L: 0
	リークチェック: 0	自己洗浄: 0	7Lノール単独: 0	エア単独: 2

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解剤虫媒		☒	1	コネクタ継手(本体側)		☐	
排水栓		☒	1	コネクタ継手(コネクタ側)		☐	
濃度計フィルター		☒	1			☐	
オゾン濃度計 Assy		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄		年 月 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。		
ご署名 坂 川 一 印		

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
 東京都文京区本郷3-12-5
 TEL: 03-3816-0444

責任技術者	作業者