

いいね子 7/27 御中

点検確認書

株式会社 IHIシバウラ
環境事業部

点検担当者: 幸平

点検年月日	平成24年 4月 3日	機種名	ONW-10	製造機番	266
設置場所				TEL:	
設置時期		使用時間		御対応者	

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常	☒	交換	☐
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐
ランプ類				
操作パネル	正常	☒	交換	☐
蛍光灯	正常	☒	交換	☐
洗浄動作				
フタロック	正常	☒	調整	☐
給水	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 エアバージ	正常	☒	調整	☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐
排水	正常	☒	調整	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐
性能確認				
オゾン水濃度	正常	☒	濃度: 0.5	mg/L
オゾンインジケータ	正常	☒		
酸素発生	正常	☒	濃度: 91.8%	流量: 0.29 L/min 圧力: 0.104 ~ 0.124 MPa
水漏れ確認				
装置外	正常	☒	調整	☐
装置内	正常	☒	調整	☐
清掃				
外装	正常	☐	清掃	☒
内部	正常	☐	清掃	☒
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐

交換部品	数量	コメント
吸着筒	一式	今回で総合メンテナンスの契約期限 となりです。
吸湿筒	一式	
ドレン用フィルタ	一個	
オゾン分解触媒	一個	
交換	一式	

年 月 日

ご署名 早乙女

印

※: 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

内視鏡洗浄機 ONW-10 作業チェックリスト

株式会社IHシバウラ

環境事業部

日付: 2012年 4月 3日 作業者: 坪平

ONW-10 機番: 266 PSA機番: SPS- 10483 客先: いいぬま 7127 様

定期交換部品	
吸着筒と吸湿筒を交換したか (取り外したPSA機番を記入 SPS-)	☒ 合 / 否
ドレン用フィルターを交換したか	☒ 合 / 否
排水シリコンチューブを交換したか	☒ 合 / 否
オゾン分解触媒を交換したか	☒ 合 / 否
配管チューブは確実に奥まで差し込んだか 再確認のこと	☒ 合 / 否
取付ボルトの締め忘れ・ガタはないか? 確実に取り付いているか	☒ 合 / 否
PSA性能確認	
圧力スイッチのゼロ点は合っているか (±0.005Mpa以内)	☒ 合 / 否
酸素濃度の確認(運転開始から約3分後) (90%以上) (91.2 %)	☒ 合 / 否
酸素流量は適切か(0.73~0.82L/min) (0.79 L/min)	☒ 合 / 否
コンプレッサ圧力(最大圧力0.140Mpa以上) (最低 0.104 Mpa~最大 0.124 Mpa)	☒ 合 / 否
外装の取付	
オゾンセンサーは配線したか	☒ 合 / 否
フロントパネルのランプは配線したか	☒ 合 / 否
フロントパネルとサイドパネルの隙間は均等か	☒ 合 / 否
ドレンチューブは接続したか	☒ 合 / 否
確認事項	
フタパッキンに削がれはないか	☒ 合 / 否
内視鏡接続コネクタのパッキン、Oリングは正常か	☒ 合 / 否
洗浄槽・排水パイプ、下部フィルタは清掃したか(汚れある場合清掃)	☒ 合 / 否
定期メンテナンスシールに点検日を記入したか	☒ 合 / 否
定期点検カウンタをリセットしたか(フィルタリセットスイッチ20秒長押し)	☒ 合 / 否
別紙 点検確認書に記録したか	☒ 合 / 否
確認試験	
オゾン水濃度の確認(オゾン水インジケータで0.3mg/L以上)	☒ 合 / 否
運転は正常か、エラーはでないか	☒ 合 / 否
インジケータの変色は良好か	☒ 合 / 否
運転プログラムのバージョン確認(平成21年6月現在「10」が最新)	☒ 合 / 否

不具合内容・特記事項 (否の場合、Noと共に理由を記入)

院長へ総合メンテナンス契約期限である事を説明、OEBもPR(買い換えPR)。
 買い換えも検討したいという事で、後日、定期メンテナンス無し、買い換え
 のいずれかへはどちらを連絡したいかを伺う事。