

ニ7"2 7/12 御中

点検確認書

株式会社 IHIシバウラ
環境事業部点検担当者: 山本

点検年月日	平成24年 4月 12日	機種名	ONW-10	製造機番	901
設置場所				TEL:	
設置時期		使用時間		御対応者	

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常	☒	交換	☐
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐
ランプ類				
操作パネル	正常	☒	交換	☐
蛍光灯	正常	☒	交換	☐
洗浄動作				
フタロック	正常	☒	調整	☐
給水	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐
排水	正常	☒	調整	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐
性能確認				
オゾン水濃度	正常	☒	濃度: 0.5 mg/L	
オゾンインジケータ	正常	☒		
酸素発生	正常	☒	濃度: 92.3% 流量: 0.80 L/min 圧力: 0.05MPa ~ 0.16MPa	
水漏れ確認				
装置外	正常	☒	調整	☐
装置内	正常	☒	調整	☐
清掃				
外装	正常	☐	清掃	☒
内部	正常	☐	清掃	☒
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐

交換部品		数量	コメント 機器故障等問題なし。
吸着筒	交換 ☒	一式	
吸湿筒	交換 ☒	一式	
ドレン用フィルタ	交換 ☒	一個	
オゾン分解触媒	交換 ☒	一個	
	交換 ☐		

年 月 日		
ご署名 <u>シグマ・フロンクス</u> 印		

※: 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

内視鏡洗浄機 ONW-10 作業チェックリスト

株式会社IHIシバウラ
環境事業部

日付: 11年 4月 12日 作業者: 寺平

ONW-10 機番: 90 / PSA機番: SPS-10A54 客先: 272771277 様

定期交換部品	
吸着筒と吸湿筒を交換したか (取り外したPSA機番を記入 SPS-1205)	(合) 否
ドレン用フィルターを交換したか	(合) 否
排水シリコンチューブを交換したか	(合) 否
オゾン分解触媒を交換したか	(合) 否
配管チューブは確実に奥まで差し込んだか 再確認のこと	(合) 否
取付ボルトの締め忘れ・ガタはないか? 確実に取り付いているか	(合) 否
PSA性能確認	
圧力スイッチのゼロ点は合っているか (±0.005Mpa以内)	(合) 否
酸素濃度の確認 (運転開始から約3分後) (90%以上) (92.3 %)	(合) 否
酸素流量は適切か (0.73~0.82L/min) (0.80 L/min)	(合) 否
コンプレッサ圧力(最大圧力0.140Mpa以上) (最低0.08Mpa~最大0.160Mpa)	(合) 否
外装の取付	
オゾンセンサーは配線したか	(合) 否
フロントパネルのランプは配線したか	(合) 否
フロントパネルとサイドパネルの隙間は均等か	(合) 否
ドレンチューブは接続したか	(合) 否
確認事項	
フタパッキンに剥がれはないか	(合) 否
内視鏡接続コネクタのパッキン、Oリングは正常か	(合) 否
洗浄槽・排水パイプ、下部フィルタは清掃したか(汚れある場合清掃)	(合) 否
定期メンテナンスシールに点検日を記入したか	(合) 否
定期点検カウンタをリセットしたか(フィルタリセットスイッチ20秒長押し)	(合) 否
別紙 点検確認書に記録したか	(合) 否
確認試験	
オゾン水濃度の確認(オゾン水インジケータで0.3mg/L以上)	(合) 否
運転は正常か、エラーはでないか	(合) 否
インジケータの変色は良好か	(合) 否
運転プログラムのバージョン確認(平成21年6月現在「10」が最新)	(合) 否

不具合内容・特記事項 (否の場合、Noと共に理由を記入)