

点検確認書

株式会社 IHIシバウラ
環境事業部

点検担当者: 安藤 南田

点検年月日	平成29年 4月 9日	機種名	ONW-10	製造機番	000599
設置場所	内視鏡室	TEL			0276-45-1133
設置時期		使用時間		御対応者	

点検項目		点検結果			
スイッチ類					
電源釦	正常	☒	交換	☐	
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐	
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐	
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐	
ランプ類					
操作パネル	正常	☒	交換	☐	
② 蛍光灯	正常	☐	交換	☐ 交換が必要です。	
洗浄動作					
フタロック	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐	
給水	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐	
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐	
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐	
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐	
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐	
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐	
排水	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐	
異常音、振動	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐	
性能確認					
オゾン水濃度	正常	☒	濃度:	0.4 mg/L	
オゾンインジケータ	正常	☒			
酸素発生	正常	☒	濃度: 99.5%	流量: 0.76 L/min 圧力: 0.153 ~ 0.08 MPa	
水漏れ確認					
装置外	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐	
装置内	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐	
清掃					
外装	正常	☒	清掃	☐	
内部	正常	☒	清掃	☐	
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐	
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐	

交換部品		数量	コメント
吸着筒	交換 ☒	一式	ランプ類 蛍光灯 破損為 交換が必要です。
吸湿筒	交換 ☒	一式	
ドレン用フィルタ	交換 ☒	一個	
オゾン分解触媒	交換 ☒	一個	

29年 4月 9日

ご署名 高沢 三子





内視鏡洗浄機 作業チェックリスト

株式会社IHIシバウラ
環境事業部

日付: 2012. 4. 9

作業者 宇藤 和也

ONW-10機番: 000599

PSA機番: SPS-10904

客先: 高次胃腸科 外科

様

定期交換部品	
吸着筒と吸湿筒を交換したか (取り外したPSA機番を記入 SPS-10386)	合/否
ドレン用フィルターを交換したか	合/否
排水シリコンチューブを交換したか	合/否
オゾン分解触媒を交換したか	合/否
配管チューブは確実に奥まで差し込んだか 再確認のこと	合/否
取付ボルトの締め忘れ・ガタはないか? 確実に取り付いているか	合/否
PSA性能確認	
圧力スイッチのゼロ点は合っているか (±0.005Mpa以内)	合/否
酸素濃度の確認(運転開始から約3分後)(90%以上) (94.5 %)	合/否
酸素流量は適切か(0.73~0.82L/min) (0.76 L/min)	合/否
PSA圧力の確認 (0.153 Mpa) ~ (0.081 Mpa)	参考値
外装の取付	
オゾンセンサーは配線したか	合/否
フロントパネルのランプは配線したか	合/否
フロントパネルとサイドパネルの隙間は均等か	合/否
ドレンチューブは接続したか	合/否
確認事項	
フタパッキンに剥がれはないか	合/否
内視鏡接続コネクタのパッキン、Oリングは正常か	合/否
洗浄槽・排水パイプ、下部フィルタは清掃したか(汚れある場合清掃)	合/否
定期メンテナンスシールに点検日を記入したか	合/否
定期点検カウンタをリセットしたか(フィルタリセットスイッチ20秒長押し)	合/否
別紙 点検確認書に記録したか	合/否
確認試験	
オゾン水濃度の確認(オゾン水インジケータで0.3mg/L以上)	合/否
運転は正常か、エラーはでないか	合/否
インジケータの変色は良好か	合/否

不具合内容・特記事項 (否の場合、Noと共に理由を記入)

。客先より不良品交換が必要です。