

えはら内科クリニック御中

点検確認書

株式会社 IHIシパウラ
環境事業部

点検担当者: 角田

点検年月日	平成24年 4月 24日	機種名	ONW-10	製造機番	001343
設置場所				TEL	0276-6-3130
設置時期		使用時間		御対応者	

点検項目		点検結果			
スイッチ類					
電源釦	正常	☒	交換	☐	
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐	
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐	
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐	
ランプ類					
操作パネル	正常	☒	交換	☐	
蛍光灯	正常	☒	交換	☐	
洗浄動作					
フタロック	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
給水	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
細管洗浄 エアバージ	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
アルコールフラッシュ	正常	☐	調整	☐	交換 ☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
排水	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
性能確認					
オゾン水濃度	正常	☒	濃度:	0.5 mg/L	
オゾンインジケータ	正常	☒			
酸素発生	正常	☒	濃度: 2.3%	流量: 0.78 L/min	圧力: 0.160 ~ 0.095 MPa
水漏れ確認					
装置外	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
装置内	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
清掃					
外装	正常	☒	清掃	☐	
内部	正常	☒	清掃	☐	
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐	交換 ☐

交換部品	数量	コメント
吸着筒	一式	
吸湿筒	一式	
ドレン用フィルタ	一個	
オゾン分解触媒	一個	
24年 4月 24日 江原 浩司		

内視鏡洗浄機 作業チェックリスト

株式会社IHIシバウラ
環境事業部

日付: 2012年4月29日 作業者: 阿部 健
ONW-10機番: 001313 PSA機番: SPS-10868 客先: えびら 内科クリニック 様

定期交換部品	
吸着筒と吸湿筒を交換したか (取り外したPSA機番を記入 SPS-10396)	○/否
ドレン用フィルターを交換したか	○/否
排水シリコンチューブを交換したか	○/否
オゾン分解触媒を交換したか	○/否
配管チューブは確実に奥まで差し込んだか 再確認のこと	○/否
取付ボルトの締め忘れ・ガタはないか? 確実に取り付いているか	○/否
PSA性能確認	
圧力スイッチのゼロ点は合っているか (±0.005Mpa以内)	○/否
酸素濃度の確認(運転開始から約3分後) (90%以上)	(92.3 %) ○/否
酸素流量は適切か (0.73~0.82L/min)	(0.78 L/min) ○/否
PSA圧力の確認 (0.160 Mpa) ~ (0.095 Mpa)	参考値
外装の取付	
オゾンセンサーは配線したか	○/否
フロントパネルのランプは配線したか	○/否
フロントパネルとサイドパネルの隙間は均等か	○/否
ドレンチューブは接続したか	○/否
確認事項	
フタパッキンに剥がれはないか	○/否
内視鏡接続コネクタのパッキン、Oリングは正常か	○/否
洗浄槽・排水パイプ、下部フィルタは清掃したか(汚れある場合清掃)	○/否
定期メンテナンスシールに点検日を記入したか	○/否
定期点検カウンタをリセットしたか(フィルタリセットスイッチ20秒長押し)	○/否
別紙 点検確認書に記録したか	○/否
確認試験	
オゾン水濃度の確認(オゾン水インジケータで0.3mg/L以上)	○/否
運転は正常か、エラーはでないか	○/否
インジケータの変色は良好か	○/否

不具合内容・特記事項 (否の場合、Noと共に理由を記入)