

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

02-32518

No. 111014

配布先	客先	納入先	新鋭工業（株）東京支店 殿	機種	ONW-10
環境	環品	所在地	栃木県栃木県佐野市植上町 1677	機番	001586
		ユーザー名	佐野医師会病院 様	納入日	平成 22 年 4 月 16 日
		点検者	中澤一裕	作業時間	
		返送先	納入先と同じ	受付日	平成 23 年 8 月 3 日
計	3			発送日	平成 23 年 10 月 7 日

修理依頼・異常内容

- ・自動排水運転中の表示「18」が点くことがある。（購入3か月～現在）
- ・エラー7（洗浄中フタ開）発生。

不具合原因（故障箇所）と処置予定

〔1〕点検結果（不具合箇所と不具合原因）

自動排水運転「18」につきまして

運転終了後に水位センサーが残水を検知すると、排水ポンプが運転を開始します。
排水運転中は「18」が点滅し、ピー音がして、排水が終了すると「洗浄可能」になります。
なおオゾン水洗浄は正常に終了しています。

「18」の推定原因につきまして

- ① 排水口からの逆流や水の滞留。
- ② 残水を検知する水位センサーの劣化、誤検知。
- ③ 排水ポンプの性能低下。

お預かりしている間、運転条件を振って確認しましたが特に異常はありませんでした。
今後、原因を特定するために水位センサーと排水ポンプを交換
しましたので様子を見てくださいますよう、お願いいたします。

交換部品



〔2〕修理・点検内容

1. 部品交換、エラー7修理（フタロック調整）
2. オゾン水濃度測定：0.46～0.50 mg/L・・・正常
3. PSA（酸素発生装置）性能点検・・・正常
酸素濃度：91.6% 酸素流量：0.82L/min 圧力：0.119～0.206MPa
4. 運転確認 異常なし。インジケータ変色 異常なし
5. 運転カウンタ：1503回

—以上—

交換部品

部品コード	部品名称	数量	備考
	排水ポンプ（P-3）		
	水位レベルセンサー（Lo）		

承認

江
23.10.14
口

審査

江
23.10.14
口

作成

H23. 10. 14

中澤