

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成24年 5 月 22日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	100228	
作業年月日	平成24年 5 月 22 日		作業時間	2.0	Hr
顧客名	熊野前医院		TEL	03-3819-2535	
所在地	東京都荒川区東尾久 3-19-8		担当	村上	様
販売店			担当		様
納入年月日	平成23年 5 月 20 日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐	年 回目	定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
排水孔が詰まり、（水漏れが確認できず） 定期点検依頼	
不具合原因、作業内容	
ポンプ内に残った水（排水孔が詰まりのため） 定期点検実施	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ バルブ数 891
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード 正常 ☒
トレイ 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	正常 ☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項	
本体正常	

装置 情報	交換後運転回数： 4	更新（リセット） ☒ 実施・未実施	殺菌： 3	殺菌＋7L： 1
	リークチェック： 0	自己洗浄： 0	7Lコル単独： 0	エア単独： 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	オゾンセンサー		☒	1
排水栓		☒	1			☐	
オゾン濃度計		☒	1			☐	
吸盤		☒	2			☐	
排水チューブ		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄		24 年 5 月 22 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。		10 y 20 印
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。		
ご署名		

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL：03-3816-0444

責任技術者	作業者
西野	西野