

新郷中央診療所御中

点検確認書

株式会社 IHIシバウラ
環境事業部

点検担当者: 稲葉

点検年月日	平成24年 3 月 5 日	機種名	ONW-10	製造機番	001505
設置場所	1F リセツ室			TEL	
設置時期	H20. 1-21	使用時間		御対応者	

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常 ☒	交換 ☐		
フィルタリセット釦	正常 ☒	交換 ☐		
運転/停止釦	正常 ☒	交換 ☐		
アルコールモード釦	正常 ☒	交換 ☐		
ランプ類				
操作パネル	正常 ☒	交換 ☐		
蛍光灯	正常 ☒	交換 ☐		
洗浄動作				
フタロック	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐	
給水	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐	
細管洗浄 順方向	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐	
細管洗浄 逆方向	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐	
細管洗浄 エアパージ	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐	
アルコールフラッシュ	正常 ☐	調整 ☐	交換 ☐	
オゾン分解ファン	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐	
排水	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐	
異常音、振動	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐	
性能確認				
オゾン水濃度	正常 ☒	濃度: 0.4 mg/L		
オゾンインジケータ	正常 ☒			
酸素発生	正常 ☒	濃度: 94.1% 流量: 0.83 L/min 圧力: 0.086~0.156 MPa		
水漏れ確認				
装置外	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐	
装置内	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐	
清掃				
外装	正常 ☒	清掃 ☒		
内部	正常 ☒	清掃 ☒		
洗浄コネクタ	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐	
洗浄チューブ	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐	

交換部品	数量	コメント
吸着筒	一式	
吸湿筒	一式	
ドレン用フィルタ	一個	
オゾン分解触媒	一個	

24年 6 月 5 日

ご署名

加藤 金吾

印

内視鏡洗浄機 作業チェックリスト

株式会社IHIシバウラ
環境事業部

日付: 2012/06/05 作業者: 稲 衛
ONW-10機番: 001505 PSA機番: SPS-10755 客先: 様

定期交換部品		
吸着筒と吸湿筒を交換したか (取り外したPSA機番を記入 SPS- 0779)		合/否
ドレン用フィルターを交換したか		合/否
排水シリコンチューブを交換したか		合/否
オゾン分解触媒を交換したか		合/否
配管チューブは確実に奥まで差し込んだか 再確認のこと		合/否
取付ボルトの締め忘れ・ガタはないか? 確実に取り付いているか		合/否
PSA性能確認		
圧力スイッチのゼロ点は合っているか -0.005		合/否
酸素濃度の確認(運転開始から約5分後)(90%以上) (94.1 %)		合/否
酸素流量は適切か(0.73~0.82L/min) (0.80 L/min)		合/否
PSA圧力の確認 (0.086 Mpa) ~ (0.156 Mpa)		参考値
外装の取付		
オゾンセンサーは配線したか		合/否
フロントパネルのランプは配線したか		合/否
フロントパネルとサイドパネルの隙間は均等か		合/否
確認事項		
フタパッキンに剥がれはないか		合/否
内視鏡接続コネクタのパッキン、Oリングは正常か		合/否
洗浄槽・排水パイプ、下部フィルタは清掃したか(汚れある場合清掃)		合/否
定期メンテナンスシールに点検日を記入したか		合/否
定期点検カウンタをリセットしたか(フィルタリセットスイッチ20秒長押し)		合/否
確認試験		
別紙 点検確認書に記録したか		合/否
オゾン水濃度の確認(0.3mg/L以上)		合/否
運転は正常か、エラーはでないか		合/否
インジケータの変色は良好か		合/否

不具合内容・特記事項 (否の場合、Noと共に理由を記入)

この用紙は作業者の控え。
客先には点検確認書のコピーを渡すこと