

みよし胃腸クリニック 御中

点検確認書

株式会社 IH シンバウラ
環境事業部

点検担当者： 渡 辺

点検年月日	平成23年10月19日	機種名	ONW-1.0	製造機番	779
設置場所	川越市砂新田109-1			TEL	049-238-6011
設置時期	平成 年 月 日	使用時間		御対応者	

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常	☒	交換	☐
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐
ランプ類				
操作パネル	正常	☒	交換	☐
蛍光灯	正常	☒	交換	☐
洗浄動作				
フタロック	正常	☒	調整	☐
給水	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐
アルコールブラッシュ	正常	☒	調整	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐
排水	正常	☒	調整	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐
性能確認				
オゾン水濃度	正常	☐	濃度	mg/l
オゾンインジケータ	正常	☐		
酸素発生	正常	☒	濃度 91.3%	流量 0.75 l/min 圧力 91~166 MPa
水漏れ確認				
装置外	正常	☒	調整	☐
装置内	正常	☒	調整	☐
清掃				
外装	正常	☒	清掃	☐
内部	正常	☒	清掃	☐
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐

交換部品		数量	コメント
吸着筒	交換 ☒	一式	
吸湿筒	交換 ☒	一式	
ドレン用フィルタ	交換 ☒	一個	
オゾン分解触媒	交換 ☒	一個	

年 月 日

ご署名 正岡 印

※：本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

日 付: 2011.10.19 作業者

ONW-10機種: 779 PSA機種:SPS- 689 客先: みよし胃腸クリニック 様

定期交換部品			
吸着筒と吸湿筒を交換したか (取り外したPSA機番を記入 SPS- 199)		合/否	
ドレン用フィルターを交換したか		合/否	
排水シリコンチューブを交換したか		合/否	
オゾン分解触媒を交換したか		合/否	
配管チューブは確実に奥まで差し込んだか 再確認のこと		合/否	
取付ボルトの締め忘れ・ガタはないか? 確実に取り付いているか		合/否	
PSA性能確認			
圧カスイッチのゼロ点はあるか (±0.005Mpa以内)		合/否	
酸素濃度の確認 (運転開始から約3分後) (90%以上)	(91.2 %)	合/否	
酸素流量は適切か (0.73~0.82L/min)	(0.75L/min)	合/否	
PSA圧力の確認 (9 / Mpa) ~ (166 Mpa)		合/否	
外装の取付			
オゾンセンサーは配線したか		合/否	
フロントパネルのランプは配線したか		合/否	
フロントパネルとサイドパネルの隙間は均等か		合/否	
ドレンチューブは接続したか		合/否	
確認事項			
フタ・ベッキンに剥がれは無いか		合/否	
内視鏡接続コネクタのベッキン、リングは正常か		合/否	
洗浄槽・排水パイプ、下部フィルターは清掃したか (汚れのある場合清掃)		合/否	
定期メンテナンスシールに点検日を記入したか		合/否	
定期点検カウンタースリットをリセットしたか (フィルターリセットスイッチ20秒長押し)		合/否	
別紙 点検確認書に記録したか		合/否	
確認試験			
オゾン水濃度の確認(オゾンインジケータで0.3mg/L以上)		合/否	
運転は正常か、エラーはでないか		合/否	
インジケータの変色は良好か		合/否	
PSAカウンタ			回
PSA2hカウンタ			回
総洗浄回数			1649回
定期点検用洗浄カウンタ			281回

不具合内容・特記事項 (否の場合、NOと共に理由を記入)