

いらい医院 御中

点検確認書

株式会社 IHIシバウラ
環境事業部

点検担当者: 鈴木

点検年月日	平成23年 11 月 15 日	機種名	ONW-10	製造機番	1038A
設置場所				TEL:	
設置時期		使用時間		御対応者	

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常 ☒	交換	☐	
フィルタリセット釦	正常 ☒	交換	☐	
運転/停止釦	正常 ☒	交換	☐	
アルコールモード釦	正常 ☒	交換	☐	
ランプ類				
操作パネル	正常 ☒	交換	☐	
蛍光灯	正常 ☒	交換	☐	
洗浄動作				
フタロック	正常 ☒	調整	☐	交換 ☐
給水	正常 ☒	調整	☐	交換 ☐
細管洗浄 順方向	正常 ☒	調整	☐	交換 ☐
細管洗浄 逆方向	正常 ☒	調整	☐	交換 ☐
細管洗浄 エアバージ	正常 ☒	調整	☐	交換 ☐
アルコールフラッシュ	正常 ☒	調整	☐	交換 ☐
オゾン分解ファン	正常 ☒	調整	☐	交換 ☐
排水	正常 ☒	調整	☐	交換 ☐
異常音、振動	正常 ☒	調整	☐	交換 ☐
性能確認				
オゾン水濃度	正常 ☒	濃度:	0.5	mg/L
オゾンインジケータ	正常 ☒			
酸素発生	正常 ☒	濃度: 92.5%	流量: 0.79 L/min	圧力: 0.105~0.110 MPa
水漏れ確認				
装置外	正常 ☒	調整	☐	交換 ☐
装置内	正常 ☒	調整	☐	交換 ☐
清掃				
外装	正常 ☐	清掃	☒	
内部	正常 ☐	清掃	☒	
洗浄コネクタ	正常 ☒	調整	☐	交換 ☐
洗浄チューブ	正常 ☒	調整	☐	交換 ☐

交換部品	数量	コメント
吸着筒	一式	機器作動等問題なし。
吸湿筒	一式	
ドレン用フィルタ	一個	
オゾン分解触媒	一個	
交換	☐	
年 月 日		
ご署名 杉山		
印		

※: 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

内視鏡洗浄機 ONW-10 作業チェックリスト

株式会社IHIシバウラ
環境事業部

日付: 2013年 11月 15日 作業者: 岸 幸

ONW-10 機番: 1038

PSA機番: SPS- 10052

客先: いしはら 医院

様

定期交換部品

吸着筒と吸湿筒を交換したか (取り外したPSA機番を記入 SPS- 10073)	☒ 合 / ☐ 否
ドレン用フィルターを交換したか	☒ 合 / ☐ 否
排水シリコンチューブを交換したか	☒ 合 / ☐ 否
オゾン分解触媒を交換したか	☒ 合 / ☐ 否
配管チューブは確実に奥まで差し込んだか 再確認のこと	☒ 合 / ☐ 否
取付ボルトの締め忘れ・ガタはないか? 確実に取り付いているか	☒ 合 / ☐ 否

PSA性能確認

圧力スイッチのゼロ点は合っているか ($\pm 0.005\text{Mpa}$ 以内)	☒ 合 / ☐ 否
酸素濃度の確認(運転開始から約3分後) (90%以上)	(92.5 %) ☒ 合 / ☐ 否
酸素流量は適切か (0.73~0.82L/min)	(0.79 L/min) ☒ 合 / ☐ 否
コンプレッサ圧力(最大圧力0.140Mpa以上)	(最低 0.105 Mpa ~ 最大 0.18 Mpa) ☒ 合 / ☐ 否

外装の取付

オゾンセンサーは配線したか	☒ 合 / ☐ 否
フロントパネルのランプは配線したか	☒ 合 / ☐ 否
フロントパネルとサイドパネルの隙間は均等か	☒ 合 / ☐ 否
ドレンチューブは接続したか	☒ 合 / ☐ 否

確認事項

フタパッキンに剥がれはないか	☒ 合 / ☐ 否
内視鏡接続コネクタのパッキン、Oリングは正常か	☒ 合 / ☐ 否
洗浄槽・排水パイプ、下部フィルタは清掃したか(汚れある場合清掃)	☒ 合 / ☐ 否
定期メンテナンスシールに点検日を記入したか	☒ 合 / ☐ 否
定期点検カウンタをリセットしたか(フィルタリセットスイッチ20秒長押し)	☒ 合 / ☐ 否
別紙 点検確認書に記録したか	☒ 合 / ☐ 否

確認試験

オゾン水濃度の確認(オゾン水インジケータで0.3mg/L以上)	☒ 合 / ☐ 否
運転は正常か、エラーはでないか	☒ 合 / ☐ 否
インジケータの変色は良好か	☒ 合 / ☐ 否
運転プログラムのバージョン確認(平成21年6月現在「10」が最新)	☒ 合 / ☐ 否

不具合内容・特記事項 (否の場合、Noと共に理由を記入)