

点検確認書

株式会社 IHIシバウラ
環境事業部

点検担当者: 安藤 佐藤

点検年月日	平成 23年 11月 21日	機種名	ONW-10	製造機番	001299
設置場所	内板鏡室			TEL: 048-574-8050	
設置時期	平成 年 月 日	使用時間		御対応者	

点検項目		点検結果			
スイッチ類					
電源釦	正常	☒	交換	☐	
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐	
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐	
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐	
ランプ類					
操作パネル	正常	☒	交換	☐	
蛍光灯	正常	☒	交換	☐	
洗浄動作					
フタロック	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
給水	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
アルコールフラッシュ	正常	☐	調整	☐	交換 ☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
排水	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
性能確認					
オゾン水温度	正常	☒	濃度:	25	mg/L
オゾンインジケータ	正常	☒			
酸素発生	正常	☒	濃度:	92.0%	流量: 7.6 L/min 圧力: 0.148 ~ 0.083 MPa
水漏れ確認					
装置外	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
装置内	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
清掃					
外装	正常	☒	清掃	☐	
内部	正常	☒	清掃	☐	
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐	交換 ☐

交換部品	数量	コメント
吸着筒	交換 ☒ 一式	
吸湿筒	交換 ☒ 一式	
ドレン用フィルタ	交換 ☐ 一個	
オゾン分解触媒	交換 ☒ 一個	

H23 年 11 月 21 日

ご署名 齊藤 敬



※: 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

内視鏡洗浄機 作業チェックリスト

株式会社IHシバウラ

環境事業部

日付: 2011.11.21

作業者: 山崎 幸子

佐藤 孝

ONW-10機番: 001289

PSA機番: SPS-

客先: 青藤内科医院

様

定期交換部品		
吸着筒と吸湿筒を交換したか (取り外したPSA機番を記入 SPS-1149)	☒ 合	☐ 否
ドレン用フィルターを交換したか	☒ 合	☐ 否
排水シリコンチューブを交換したか	☒ 合	☐ 否
オゾン分解触媒を交換したか	☒ 合	☐ 否
配管チューブは確実に奥まで差し込んだか 再確認のこと	☒ 合	☐ 否
取付ボルトの締め忘れ・ガタはないか? 確実に取り付いているか	☒ 合	☐ 否
PSA性能確認		
圧力スイッチのゼロ点は合っているか	☒ 合	☐ 否
酸素濃度の確認(運転開始から約5分後)(90%以上)	(97.0 %)	☒ 合
酸素流量は適切か(0.73~0.82L/min)	(7.6 L/min)	☒ 合
PSA圧力の確認 (0.083 Mpa) ~ (0.148 Mpa)		参考値
外装の取付		
オゾンセンサーは配線したか	☒ 合	☐ 否
フロントパネルのランプは配線したか	☒ 合	☐ 否
フロントパネルとサイドパネルの隙間は均等か	☒ 合	☐ 否
確認事項		
フタパッキンに剥がれはないか	☒ 合	☐ 否
内視鏡接続コネクタのパッキン、Oリングは正常か	☒ 合	☐ 否
洗浄槽・排水パイプ、下部フィルタは清掃したか(汚れある場合清掃)	☒ 合	☐ 否
定期メンテナンスシールに点検日を記入したか	☒ 合	☐ 否
定期点検カウンタをリセットしたか(フィルタリセットスイッチ20秒長押し)		
確認試験		
別紙 点検確認書に記録したか	☒ 合	☐ 否
オゾン水濃度の確認(0.3mg/L以上)	☒ 合	☐ 否
運転は正常か、エラーはでないか	☒ 合	☐ 否
インジケータの変色は良好か	☒ 合	☐ 否

不具合内容・特記事項 (否の場合、Noと共に理由を記入)

この用紙は作業者の控え。
客先には点検確認書のコピーを渡すこと