

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

No. 120625

配布先	納入先	新鋭工業（株） 東京支店 殿			機種	ONW-10
客先	所在地	埼玉県所沢市小手指町1丁目3-3			機番	001359
環営	ユーザー名	所沢肛門病院 様			納入日	平成20年3月29日
防品	点検者	中澤一裕	作業時間		受付日	平成24年5月23日
	返送先	納入先と同じ			発送日	平成24年6月21日
計	3					

修理依頼・苦情内容

5/22 水漏れ発生。

5/23 弊社若井が出張して状況を確認。

- ・洗浄チューブは外れていない
- ・フロント側に水滴及び水漏れの跡を確認。
- ・運転したが水漏れは再現しなかった。

【修理歴】平成23年11月 洗浄槽交換

不具合原因（故障箇所）と処置予定

〔1〕点検結果（不具合箇所と不具合原因）

下記の作業を行い、水漏れはありませんでした。


- ・洗浄槽に水を入れたまま約3日間放置。（写真1）
- ・テストモード運転：給水電磁弁、水位センサーの正常動作を確認。
- ・通常運転：アルコール無モードで3回運転

水漏れの原因は推定になりますが、フタの金具部分に開口部があり、そこから水が溢れて機械外に漏れたと思われます。水槽の水位を制御する部品の交換と開口部を塞ぎましたので、様子を見てくださいますようお願いいたします。

写真1：水張り中



写真2：通常の水位と開口部

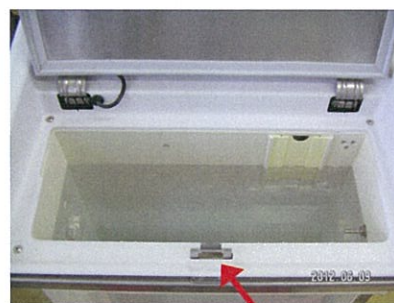

〔2〕修理・点検内容

1. 部品交換：下表と写真2をご参照ください。
2. オゾン水濃度測定：0.46～0.58mg/L ・ 正常
3. P S A（酸素発生装置）性能点検 ・ 正常
酸素濃度：94.2% 酸素流量：0.72L/min 圧力：0.094～0.167MPa（AC100V, 50Hz）
4. 運転確認 異常なし。インジケータ変色 異常なし

—以上—

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
	コントロール基板	1枚	調査のため無償交換
	運転回数：14403		

承認

江
24.6.25
口

審査

江
24.6.25
口

作成

H24.6.25

中澤