

みさゆきクリーニング 御中

点検確認書

株式会社 IHIシバウラ
環境事業部

点検担当者: 佐藤貴則

点検年月日	平成29年 6 月 25 日	機種名	ONW-10	製造機番	001051
設置場所				TEL	06-662-8305
設置時期		使用時間		御対応者	

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源鈕	正常 ☒	交換	☐	
フィルタリセット鈕	正常 ☒	交換	☐	
運転/停止鈕	正常 ☒	交換	☐	
アルコールモード鈕	正常 ☒	交換	☐	
ランプ類				
操作パネル	正常 ☒	交換	☐	
蛍光灯	正常 ☒	交換	☐	
洗浄動作				
フタロック	正常 ☒	調整	☐	交換 ☐
給水	正常 ☒	調整	☐	交換 ☐
細管洗浄 順方向	正常 ☒	調整	☐	交換 ☐
細管洗浄 逆方向	正常 ☒	調整	☐	交換 ☐
細管洗浄 エアバージ	正常 ☒	調整	☐	交換 ☐
アルコールフラッシュ	正常 ☐	調整	☐	交換 ☐
オゾン分解ファン	正常 ☒	調整	☐	交換 ☐
排水	正常 ☒	調整	☐	交換 ☐
異常音、振動	正常 ☒	調整	☐	交換 ☐
性能確認				
オゾン水濃度	正常 ☒	濃度: 0.5	mg/L	
オゾンインジケータ	正常 ☒			
酸素発生	正常 ☒	濃度: 54.1%	流量: 0.79 L/min	圧力: 0.192 MPa
水漏れ確認				
装置外	正常 ☒	調整	☐	交換 ☐
装置内	正常 ☒	調整	☐	交換 ☐
清掃				
外装	正常 ☒	清掃	☐	
内部	正常 ☒	清掃	☐	
洗浄コネクタ	正常 ☒	調整	☐	交換 ☐
洗浄チューブ	正常 ☒	調整	☐	交換 ☐

交換部品	数量	コメント
吸着筒	一式	
吸湿筒	一式	
ドレン用フィルタ	一個	
オゾン分解触媒	一個	

24 年 6 月 25 日

ご署名

三浦 貴則

印

内視鏡洗浄機 作業チェックリスト

株式会社IHIシバウラ
環境事業部

日付: 2012年6月25日

作業者 佐藤貴則

ONW-10機番: 001051

PSA機番: SPS-

客先: みさや 77ニッ

様

定期交換部品

吸着筒と吸湿筒を交換したか (取り外したPSA機番を記入 SPS-)	合/否
ドレン用フィルターを交換したか	合/否
排水シリコンチューブを交換したか	合/否
オゾン分解触媒を交換したか	合/否
配管チューブは確実に奥まで差し込んだか 再確認のこと	合/否
取付ボルトの締め忘れ・ガタはないか? 確実に取り付いているか	合/否

PSA性能確認

圧力スイッチのゼロ点は合っているか (±0.005Mpa以内)	合/否
酸素濃度の確認(運転開始から約3分後) (90%以上) (91.1 %)	合/否
酸素流量は適切か (0.73~0.82L/min) (0.79 L/min)	合/否
PSA圧力の確認 (1.13 Mpa) ~ (1.92 Mpa)	参考値

外装の取付

オゾンセンサーは配線したか	合/否
フロントパネルのランプは配線したか	合/否
フロントパネルとサイドパネルの隙間は均等か	合/否
ドレンチューブは接続したか	合/否

確認事項

フタパッキンに剥がれはないか	合/否
内視鏡接続コネクタのパッキン、Oリングは正常か	合/否
洗浄槽・排水パイプ、下部フィルタは清掃したか(汚れある場合清掃)	合/否
定期メンテナンスシールに点検日を記入したか	合/否
定期点検カウンタをリセットしたか(フィルタリセットスイッチ20秒長押し)	合/否
別紙 点検確認書に記録したか	合/否

確認試験

オゾン水濃度の確認(オゾン水インジケータで0.3mg/L以上)	合/否
運転は正常か、エラーはでないか	合/否
インジケータの変色は良好か	合/否

不具合内容・特記事項 (否の場合、Noと共に理由を記入)

・水槽用フィルターBが、水出口に黒い汚物がよく付着するとの問い合わせ有。
・メーカー担当鈴木様より後日、お客様へ連絡をさせて頂くようお願いした。