

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成23年12月16日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100212
作業年月日	平成23年12月16日		作業時間:	Hr
顧客名	大町診療所		TEL:	0439-67-2555
所在地	千葉県富津市売津139-1		担当	様
販売店			担当	様
納入年月日	平成 年 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	年 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

E302 (3年度維持異常) の9回連続発生。原因不明(予選機(111)への原液供給停止)
 2回目の点検時に点検実施の有無と電圧に確認(同機セッティング: 院長)
 必要 済

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルブ数 408
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☐	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒		正常	☐

作業結果(完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

機器作動等問題なし。

装置 情報	交換後運転回数: 81		更新 (リセット) 実施: 未実施	殺菌: 81	殺菌+7L: 0
	リークチェック: 0	自己洗浄: 2		7L単独: 0	エア単独: 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解用活性炭		☒	1	コネクター継手(本体側)		☐	
排水栓		☒	1	コネクター継手(コネクター側)		☐	
濃度計フィルター		☒	1			☐	
オゾン濃度計 Assy		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

大町 大町

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
 東京都文京区本郷3-12-5
 TEL: 03-3816-0444

責任技術者 作業者