

カレの木内科小児科クリニック 御中

点検確認書

株式会社 IHIシバウラ
環境事業部

点検担当者:

星 住

点検年月日	平成24年 7月 11日	機種名	ONW-10	製造機番	001790
設置場所				TEL	
設置時期		使用時間		御対応者	

点検項目	点検結果					
スイッチ類						
電源釦	正常	☒	交換	☐		
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐		
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐		
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐		
ランプ類						
操作パネル	正常	☒	交換	☐		
蛍光灯	正常	☒	交換	☐		
洗浄動作						
フタロック	正常	☒	調整	☐	交換	☐
給水	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
アルコールフラッシュ	正常	☐ 未使用	調整	☐	交換	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐	交換	☐
排水	正常	☒	調整	☐	交換	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐	交換	☐
性能確認						
オゾン水濃度	正常	☒	濃度:	0.3	mg/L	
オゾンインジケータ	正常	☒				
酸素発生	正常	☒	濃度:	94.4%	流量: 0.78 L/min	圧力: 0.088~0.16 MPa
水漏れ確認						
装置外	正常	☒	調整	☐	交換	☐
装置内	正常	☒	調整	☐	交換	☐
清掃						
外装	正常	☒	清掃	☐		
内部	正常	☒	清掃	☐		
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐	交換	☐

交換部品	数量	コメント
吸着筒	一式	上部フィルタ-から見あたりがないため、 1ヶお渡ししております。
吸湿筒	一式	
ドレン用フィルタ	一個	
オゾン分解触媒	一個	

24年 7月 11日

署名 浅野 泰弘



内視鏡洗浄機 作業チェックリスト

株式会社IHシバウラ

環境事業部

日付: 2012年 7月 11日

作業者 エムシーサービス 埼玉 星住

ONW-10機番: 001790

PSA機番: SPS-10825

客先: かの木内科小児科クリニック 様

定期交換部品		
吸着筒と吸湿筒を交換したか (取り外したPSA機番を記入 SPS- 01762)		(合) / 否
ドレン用フィルターを交換したか		(合) / 否
排水シリコンチューブを交換したか		合 / 否
オゾン分解触媒を交換したか		(合) / 否
配管チューブは確実に奥まで差し込んだか 再確認のこと		(合) / 否
取付ボルトの締め忘れ・ガタはないか? 確実に取り付いているか		(合) / 否
PSA性能確認		
圧力スイッチのゼロ点は合っているか (±0.005Mpa以内)	-0.002	(合) / 否
酸素濃度の確認(運転開始から約3分後)(90%以上)	(94.4 %)	(合) / 否
酸素流量は適切か(0.73~0.82L/min)	(0.78 L/min)	(合) / 否
PSA圧力の確認	(0.088 Mpa) ~ (0.16 Mpa)	参考値
外装の取付		
オゾンセンサーは配線したか		(合) / 否
フロントパネルのランプは配線したか		(合) / 否
フロントパネルとサイドパネルの隙間は均等か		(合) / 否
ドレンチューブは接続したか		(合) / 否
確認事項		
フタパッキンに剥がれはないか		(合) / 否
内視鏡接続コネクタのパッキン、Oリングは正常か		(合) / 否
洗浄槽・排水パイプ、下部フィルタは清掃したか(汚れある場合清掃)		(合) / 否
定期メンテナンスシールに点検日を記入したか		(合) / 否
定期点検カウンタをリセットしたか(フィルタリセットスイッチ20秒長押し)		(合) / 否
別紙 点検確認書に記録したか		(合) / 否
確認試験		
オゾン水濃度の確認(オゾン水インジケータで0.3mg/L以上)		(合) / 否
運転は正常か、エラーはでないか		(合) / 否
インジケータの変色は良好か		(合) / 否

不具合内容・特記事項 (否の場合、Noと共に理由を記入)