

点検確認書

株式会社 IHI シバウラ
環境事業部

点検担当者: 佐藤貴則

点検年月日	平成24年 7 月 6 日	機種名	ONW-10	製造機番	000058
設置場所				TEL	042-381-1112
設置時期		使用時間		御対応者	

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常	☒	交換	☐
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐
ランプ類				
操作パネル	正常	☐	交換	☐
蛍光灯	正常	☐	交換	☐
洗浄動作				
フタロック	正常	☒	調整	☐
給水	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐
排水	正常	☒	調整	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐
性能確認				
オゾン水濃度	正常	☒	濃度: 0.6 mg/L	
オゾンインジケータ	正常	☒		
酸素発生	正常	☒	濃度: 99.3% 流量: 0.77 L/min 圧力: 0.55~1.08 MPa	
水漏れ確認				
装置外	正常	☒	調整	☐
装置内	正常	☒	調整	☐
清掃				
外装	正常	☒	清掃	☒
内部	正常	☒	清掃	☒
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐

交換部品	数量	コメント
吸着筒	一式	フタヒシス701に劣化有。 今後フタ開閉時汚染を要す。 事外考えられます。 (引掛り等による開閉不良)
吸湿筒	一式	
ドレン用フィルタ	一個	
オゾン分解触媒	一個	

24 年 7 月 6 日

〒104-0001 東京都小田原市本町1-6-2 三田 和田 輝洋 代表取締役
TEL 042-381-1112
代表取締役 和田 輝洋
理事長・院長 和田 輝洋

内視鏡洗浄機 作業チェックリスト

株式会社HIシバウラ
環境事業部

日付: 2012年7月6日 作業者 佐藤貴則

ONW-10機番: 000058 PSA機番: SPS-10274 客先: 和田 37-117 様

定期交換部品		
吸着筒と吸湿筒を交換したか (取り外したPSA機番を記入 SPS-10274) 19日		合/否
ドレン用フィルターを交換したか		合/否
排水シリコンチューブを交換したか		合/否
オゾン分解触媒を交換したか		合/否
配管チューブは確実に奥まで差し込んだか 再確認のこと		合/否
取付ボルトの締め忘れ・ガタはないか? 確実に取り付けしているか		合/否
PSA性能確認		
圧力スイッチのゼロ点は合っているか (±0.005Mpa以内)		合/否
酸素濃度の確認(運転開始から約3分後)(90%以上)	(94.3 %)	合/否
酸素流量は適切か(0.73~0.82L/min)	(0.77 L/min)	合/否
PSA圧力の確認	(0.95 Mpa) ~ (1.68 Mpa)	参考値
外装の取付		
オゾンセンサーは配線したか		合/否
フロントパネルのランプは配線したか		合/否
フロントパネルとサイドパネルの隙間は均等か		合/否
ドレンチューブは接続したか		合/否
確認事項		
フタパッキンに剥がれはないか		合/否
内視鏡接続コネクタのパッキン、Oリングは正常か		合/否
洗浄槽・排水パイプ、下部フィルタは清掃したか(汚れある場合清掃)		合/否
定期メンテナンスシールに点検日を記入したか		合/否
定期点検カウンタをリセットしたか(フィルタリセットスイッチ20秒長押し)		合/否
別紙 点検確認書に記録したか		合/否
確認試験		
オゾン水濃度の確認(オゾン水インジケータで0.3mg/L以上)		合/否
運転は正常か、エラーはでないか		合/否
インジケータの変色は良好か		合/否

不具合内容・特記事項 (否の場合、Noと共に理由を記入)

・フタヒンジスプリング劣化有、(お客様へは説明)
・洗浄用内部ケース一部割れ有止り