

紫山内科医院 御中

点検確認書

株式会社 IHIシバウラ
環境事業部

点検担当者: 佐藤貴則

点検年月日	平成24年 7月 13日	機種名	ONW-10	製造機番	000708
設置場所				TEL	042-5943688
設置時期		使用時間		御対応者	

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常	☒	交換	☐
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐
ランプ類				
操作パネル	正常	☒	交換	☐
蛍光灯	正常	☒	交換	☐
洗浄動作				
フタロック	正常	☒	調整	☐
給水	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐
アルコールフラッシュ	正常	☐	調整	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐
排水	正常	☒	調整	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐
性能確認				
オゾン水濃度	正常	☒	濃度:	2.5 mg/L
オゾンインジケータ	正常	☒		
酸素発生	正常	☒	濃度:	92.5%
			流量:	0.8 L/min
			圧力:	0.095~0.166 MPa
水漏れ確認				
装置外	正常	☒	調整	☐
装置内	正常	☒	調整	☐
清掃				
外装	正常	☒	清掃	☒
内部	正常	☒	清掃	☒
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐

交換部品	数量	コメント
吸着筒	交換 ☐ 一式	
吸湿筒	交換 ☐ 一式	
ドレン用フィルタ	交換 ☒ 一個	
オゾン分解触媒	交換 ☒ 一個	

2012年 7月 13日

ご署名

紫山 智子



内視鏡洗浄機 作業チェックリスト

株式会社IHシバウラ
環境事業部

日付: 2012年7月13日

作業者 佐藤貴則

ONW-10機番: 000708

PSA機番: SPS-10708

客先: 紫山内科医院

様

定期交換部品	
吸着筒と吸湿筒を交換したか (取り外したPSA機番を記入 SPS-)	合 ☒ 否 ☐
ドレン用フィルターを交換したか	合 ☒ 否 ☐
排水シリコンチューブを交換したか	合 ☒ 否 ☐
オゾン分解触媒を交換したか	合 ☒ 否 ☐
配管チューブは確実に奥まで差し込んだか 再確認のこと	合 ☒ 否 ☐
取付ボルトの締め忘れ・ガタはないか? 確実に取り付いているか	合 ☒ 否 ☐
PSA性能確認	
圧力スイッチのゼロ点は合っているか (±0.005Mpa以内)	合 ☒ 否 ☐
酸素濃度の確認(運転開始から約3分後)(90%以上) (92.5 %)	合 ☒ 否 ☐
酸素流量は適切か(0.73~0.82L/min) 調整された値 0.85% (0.80 L/min)	合 ☒ 否 ☐
PSA圧力の確認 (0.095 Mpa) ~ (0.166 Mpa)	参考値
外装の取付	
オゾンセンサーは配線したか	合 ☒ 否 ☐
フロントパネルのランプは配線したか	合 ☒ 否 ☐
フロントパネルとサイドパネルの隙間は均等か	合 ☒ 否 ☐
ドレンチューブは接続したか	合 ☒ 否 ☐
確認事項	
フタパッキンに剥がれはないか	合 ☒ 否 ☐
内視鏡接続コネクタのパッキン、Oリングは正常か	合 ☒ 否 ☐
洗浄槽・排水パイプ、下部フィルタは清掃したか(汚れある場合清掃)	合 ☒ 否 ☐
定期メンテナンスシールに点検日を記入したか	合 ☒ 否 ☐
定期点検カウンタをリセットしたか(フィルタリセットスイッチ20秒長押し)	合 ☒ 否 ☐
別紙 点検確認書に記録したか	合 ☒ 否 ☐
確認試験	
オゾン水濃度の確認(オゾン水インジケータで0.3mg/L以上)	合 ☒ 否 ☐
運転は正常か、エラーはでないか	合 ☒ 否 ☐
インジケータの変色は良好か	合 ☒ 否 ☐

不具合内容・特記事項 (否の場合、Noと共に理由を記入)