

神奈川県予防医療協会御中

点検確認書

株式会社 IHIシバウラ
環境事業部

点検担当者: 幸平

点検年月日	平成24年 / 月 30 日	機種名	ONW-10	製造機番	1153
設置場所				TEL:	
設置時期		使用時間		御対応者	

点検項目		点検結果			
スイッチ類					
電源釦	正常	☒	交換	☐	
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐	
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐	
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐	
ランプ類					
操作パネル	正常	☒	交換	☐	
蛍光灯	正常	☒	交換	☐	
洗浄動作					
フタロック	正常	☒	調整	☐	
給水	正常	☒	調整	☐	
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐	
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐	
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐	
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐	
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐	
排水	正常	☒	調整	☐	
異常音、振動	正常	☒	調整	☐	
性能確認					
オゾン水濃度	正常	☒	濃度: 0.5	mg/L	
オゾンインジケータ	正常	☒			
酸素発生	正常	☒	濃度: 9.5%	流量: 0.78 L/min 圧力: 0.089~0.177 MPa	
水漏れ確認					
装置外	正常	☒	調整	☐	
装置内	正常	☒	調整	☐	
清掃					
外装	正常	☐	清掃	☒	
内部	正常	☐	清掃	☒	
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐	
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐	

交換部品	数量	コメント
吸着筒	交換 ☐ 一式	
吸湿筒	交換 ☐ 一式	
ドレン用フィルタ	交換 ☐ 一個	
オゾン分解触媒	交換 ☐ 一個	
	交換 ☐	

年 月 日

ご署名

※: 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

内視鏡洗浄機 作業チェックリスト

株式会社IHシバウラ
環境事業部

日付: 11-4、1、30

作業者: 寺平

ONW-10機番: 1153

PSA機番: SPS-

客先: 神奈川電子工学協会 様

定期交換部品

吸着筒と吸湿筒を交換したか (取り外したPSA機番を記入 SPS-)	合/否
ドレン用フィルターを交換したか	合/否
排水シリコンチューブを交換したか	合/否
オゾン分解触媒を交換したか	合/否
配管チューブは確実に奥まで差し込んだか 再確認のこと	合/否
取付ボルトの締め忘れ・ガタはないか? 確実に取り付けられているか	合/否

PSA性能確認

圧力スイッチのゼロ点は合っているか ($\pm 0.005\text{Mpa}$ 以内)	合/否
酸素濃度の確認(運転開始から約3分後) (90%以上)	(91.5 %) 合/否
酸素流量は適切か (0.73~0.82L/min)	(0.78 L/min) 合/否
PSA圧力の確認	(0.089 Mpa) ~ (0.177 Mpa) 参考値

外装の取付

オゾンセンサーは配線したか	合/否
フロントパネルのランプは配線したか	合/否
フロントパネルとサイドパネルの隙間は均等か	合/否
ドレンチューブは接続したか	合/否

確認事項

フタパッキンに剥がれはないか	合/否
内視鏡接続コネクタのパッキン、Oリングは正常か	合/否
洗浄槽・排水パイプ、下部フィルタは清掃したか(汚れある場合清掃)	合/否
定期メンテナンスシールに点検日を記入したか	合/否
定期点検カウンタをリセットしたか(フィルタリセットスイッチ20秒長押し)	合/否
別紙 点検確認書に記録したか	合/否

確認試験

オゾン水濃度の確認(オゾン水インジケータで0.3mg/L以上)	合/否
運転は正常か、エラーはでないか	合/否
インジケータの変色は良好か	合/否

不具合内容・特記事項 (否の場合、Noと共に理由を記入)