

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成24年8月6日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100243
作業年月日	平成24年8月6日		作業時間:	Hr
顧客名	児玉病院 様		TEL:	0479-23-3331
所在地	千葉県銚子市東芝町6-15		担当	様
販売店	株式会社 大田 八日市場支店 様		担当	鈴木 様
納入年月日	平成23年7月28日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シート記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

OED-1000 定期保守点検パック作業 (今回無償対応)

不具合原因、作業内容

OED-1000 定期保守点検パック作業 (今回無償対応)

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 511
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☐ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☐ (752mm社製純正部品)		正常 ☐

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

定期保守点検パック作業完了済。下記部品交換実施。作動確認実施。

装置 情報	交換後運転回数: 224 → 0	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌: 223	殺菌+7L: 1
	リークチェック: 0	自己洗浄: 2	7Lコールド: 0	エア単独: 102

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解剤中継		☒		コネクタ迷子 (本体側)	今回なし	☒	
排水栓		☒		コネクタ迷子 (コネクタ側)	今回なし	☒	
濃度計フィルター		☒				☐	
オゾン濃度計 ASSY		☒				☐	
オゾンセンサー		☒				☐	

お客様ご確認署名欄

- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

平成24年8月6日

ご署名 飯田 祥子 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL: 03-3816-0444

責任技術者	作業者
西野	土屋