

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

No. 100428

配布先	納入先	新鋭工業（株）東京支店 殿		機種	ONW-10
客先	所在地	神奈川県横浜市中区日本大通5-8		機番	001153
環営	ユーザー名	神奈川県予防医学協会中央診療所 様		納入日	平成18年9月4日
環品	点検者	中澤一裕	作業時間	受付日	平成22年1月22日
	返送先	納入先と同じ		発送日	平成22年4月28日
計	3				


修理依頼・苦情内容

エラー4再発（水位レベルセンサー異常）

不具合原因（故障箇所）と処置予定

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

- ・エラー4につきまして
運転条件（間欠、連続、水温、水量）を振って確認しましたがエラー4は再現しませんでした。
水位センサーは3箇所設置していますが、いずれかのセンサーが水の検知に失敗し、エラーを出したものと思われます。
センサーの検知精度の劣化が疑われますので全て交換いたしました。
- ・総合点検契約に基づく作業
オゾン水製造用水ポンプとフタスプリングに劣化の兆候が見られましたので交換しました。
- ・運転カウンタ：3518回

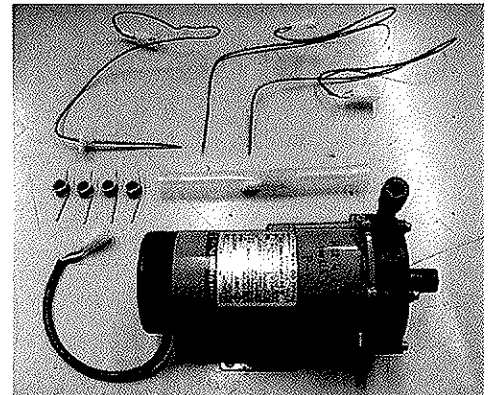

[2] 修理・点検内容

1. 部品交換・・・下表を参照してください。
2. オゾン水濃度測定：0.60～0.44mg/L・・・正常
3. PSA（酸素発生装置）性能点検・・・正常
酸素濃度：91.1% 酸素流量：0.80L/min 圧力：0.101～0.177Mpa
4. 運転確認 異常なし。インジケータ変色 異常なし

—以上—

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
	水位センサーLVH1、LVH2	2	
	水位センサーLVL	1	
	水ポンプ	1	P-1
	フタスプリング	4	
	排水シリコンチューブ	1	

承認



審査



作成

H22.4.28

中澤