

点検確認書

株式会社 IHIシパウラ
環境事業部

点検担当者： 渡 辺

点検年月日	平成24年2月3日	機種名	ONW-10	製造機番	897
設置場所	栃木県塩谷郡高根沢町宝積寺2388-5			TEL:	028-675-7521
設置時期	平成 年 月 日	使用時間		御対応者	

点検項目		点検結果			
スイッチ類					
電源釦	正常	☐	交換	☐	
フィルタリセット釦	正常	☐	交換	☐	
運転/停止釦	正常	☐	交換	☐	
アルコールモード釦	正常	☐	交換	☐	
ランプ類					
操作パネル	正常	☐	交換	☐	
蛍光灯	正常	☐	交換	☐	
洗浄動作					
フタロック	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
給水	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
排水	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
性能確認					
オゾン水濃度	正常	☒	濃度:	mg/L	
オゾンインジケータ	正常	☒			
酸素発生	正常	☒	濃度: 92.6%	流量: 0.73 l/min	圧力: 0.6~1.7 MPa
水漏れ確認					
装置外	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
装置内	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
清掃					
外装	正常	☒	清掃	☐	
内部	正常	☒	清掃	☐	
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐	交換 ☐

交換部品		数量	コメント
吸着筒	交換 ☐	一式	
吸湿筒	交換 ☐	一式	
ドレン用フィルタ	交換 ☐	一個	
オゾン分解触媒	交換 ☐	一個	

24年2月3日

ご署名

五ノ谷 誠

印

※: 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

内視鏡洗浄機 作業チェックリスト

株式会社 IHI シバウラ

環境事業部

日 付: 2012.2.3 作業者

ONW-10機番: 897 PSA機番:SPS- 客先:中津川循環器科内科クリニック 様

定期交換部品		
吸着筒と吸湿筒を交換したか (取り外したPSA機番を記入 SPS-)		合/否
ドレン用フィルターを交換したか		合/否
排水シリコンチューブを交換したか		合/否
オゾン分解触媒を交換したか		合/否
配管チューブは確実に奥まで差し込んだか 再確認のこと		合/否
取付ボルトの締め忘れ・ガタはないか? 確実に取り付いているか		合/否
PSA性能確認		
圧力スイッチのゼロ点はあっているか (±0.005Mpa以内)		合/否
酸素濃度の確認(運転開始から約3分後) (90%以上)	(92.6 %)	合/否
酸素流量は適切か (0.73~0.82L/min)	(0.73 L/min)	合/否
PSA圧力の確認	(0.6 Mpa) ~ (1.7 Mpa)	合/否
外装の取付		
オゾンセンサーは配線したか		合/否
フロントパネルのランプは配線したか		合/否
フロントパネルとサイドパネルの隙間は均等か		合/否
ドレンチューブは接続したか		合/否
確認事項		
フタパッキンに剥がれは無い		合/否
内視鏡接続コネクタのパッキン、Oリングは正常か		合/否
洗浄槽・排水パイプ、下部フィルターは清掃したか (汚れのある場合清掃)		合/否
定期メンテナンスシールに点検日を記入したか		合/否
定期点検カウンターをリセットしたか (フィルターリセットスイッチ20秒長押し)		合/否
別紙 点検確認書に記録したか		合/否
確認試験		
オゾン水濃度の確認(オゾンインジケータで0.3mg/L以上)		合/否
運転は正常か、エラーはでないか		合/否
インジケータの変色は良好か		合/否
PSAカウンタ	回	
PSA2hカウンタ	回	
総洗浄回数	1929回	
定期点検用洗浄カウンタ	157回	

不具合内容・特記事項 (否の場合、NOと共に理由を記入)