

修理報告書（引き取り修理）

修理依頼
番号

02-0716

No. 070901

配布先	納入先	新鋭工業 株式会社 東京支店 殿		機種	ONW-10
客先	所在地			機番	000242
環営	ユーザー名	大沼田メディカルクリニック 様		納入日	
防品	修理者	中澤一裕	作業時間	受付	
	返送先	納入先と同じ		発送日	2007年9月1日
計	3				

修理依頼・苦情内容

ブレーカトリップ

フロントカバー蛍光灯のコネクタに水が付着していた。装置下へ水漏れ、水溜りが見られた。

不具合原因（故障箇所）と処置内容


[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

ブレーカトリップは再現しませんでした。給水アスピレータの大気開放側配管の固定が外れて、蛍光灯のコネクタの真上に垂れ下がった状態でした。

さらにその下にあるフィルターリセットボタン上板に水が漏れて乾いた形跡がありました。おそらく給水時に大気開放側配管から水が漏れて蛍光灯のコネクタ（AC100V）に掛かり漏電ブレーカが作動したと思われます。

[2] 修理・点検内容

- 給水アスピレータ配管固定
- 水槽とアップカバーの隙間をシリコンで充填
- オゾン溶解側アスピレータチューブ交換
- 新型PSA交換
酸素濃度：93.6%、流量：0.80L/min・・正常
- 蓋パッキン交換
- 運転確認 異常なし
インジケータ変色 異常なし

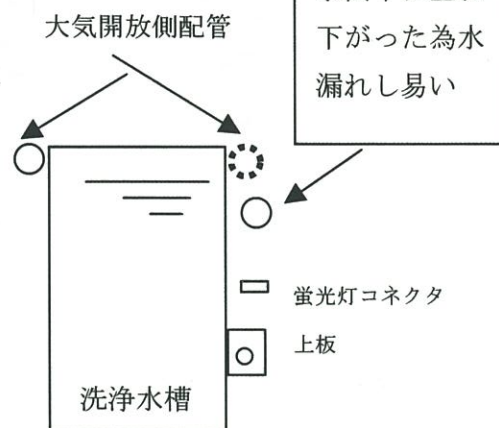

—以上—

承認

江
19.9.-6
口

審査

江
19.9.-6
口

作成

H19.9.4

中澤

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
	PSA	1	SPS-0680
	蓋パッキン	1	
	アスピレータチューブ	1	