

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成24年9月11日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000	製造番号	100365		
作業年月日	平成24年9月11日	作業時間	2 Hr		
顧客名	日吉台病院様	TEL	047-692-0001		
所在地	千葉県富里市日吉台 1-6-2	担当	遠藤 様		
販売店	株式会社 ケイセオ	担当	様		
納入年月日	平成23年9月28日	保証期間	内 ☒ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入	☐		
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付	☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

OED-1000 定期保守点検パック作業 (サービス分)

不具合原因、作業内容

OED-1000 定期保守点検パック作業実施。

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 306
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

OED-1000 定期交換部品 (下記記載) の交換・作動確認・性能確認実施。

次回点検日は平成 25 年 9 月 実施予定です。

装置 情報	交換後運転回数: 25470	更新 (リット) (実施) ・未実施	殺菌: 254	殺菌+7L: 0
	リークチェック: 0	自己洗浄: 1	アルコール単独: 0	エア単独: 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ホジ分解触媒		☐	1	ホジセンサー		☒	1
排水栓		☒	1			☐	
濃度計 アルター		☐	1			☐	
ホジ濃度計		☒	1			☐	
		☐				☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

平成24年9月11日

ご署名

遠藤 一智

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷 3-12-5
TEL: 03-3816-0444

責任技術者

作業者

西野

土屋