

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成24年9月26日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100276
作業年月日	平成24年9月26日		作業時間:	Hr
顧客名	駒込クリニック様		TEL:	0475-72-8800
所在地	千葉県山武郡大網白里町駒込1659-1		担当	様
販売店	株式会社 XTCO 茂原支店		担当	柴田 様
納入年月日	平成23年9月21日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☒	修理表示貼付	☐
出張・引取	修理 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴

OED-1000 定期保守点検パック作業

不具合原因、作業内容

OED-1000 定期保守点検パック作業実施。

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 430
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☐
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☐ (73016社製部品)		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

下記記載の定期交換部品の交換実施。 作動確認・性能確認実施。
次回は平成25年9月点検実施予定となります。

装置 情報	交換後運転回数: 8370 (更新(リセット)実施・未実施)	殺菌:	殺菌+アル:
	リークチェック: 0	自己洗浄: 81	アル単独: 7

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ホソ分解触媒		☒	1	オゾンセンサー		☒	1
排水栓		☒	1			☐	
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
濃度計フィルター		☒	1			☐	
		☐				☐	

お客様ご確認署名欄

- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

平成24年9月26日
電話 0475-72-8800
駒込クリニック

ご署名

鈴

責任技術者

作業者

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL: 03-3816-0444

西野

土屋