

点検確認書

株式会社 IHIシバウラ
環境事業部

点検担当者: IHIシバウラ 廣中

点検年月日	2012年 9月 28日	機種名	ONW-10	製造機番	000672
設置場所	検査室(1F)			TEL:	048-267-2218
設置時期	2006年 12月 27日	使用時間		御対応者	栗田様

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常	☒	交換	☐
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐
ランプ類				
操作パネル	正常	☒	交換	☐
蛍光灯	正常	☒	交換	☐
洗浄動作				
フタロック	正常	☒	調整	☐
給水	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐
排水	正常	☒	調整	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐
性能確認				
オゾン水濃度	正常	☒	濃度:	9.5 mg/L
オゾンインジケータ	正常	☒		
酸素発生	正常	☒	濃度: 93.5%	流量: 0.76 L/min 圧力: MPa
水漏れ確認				
装置外	正常	☒	調整	☐
装置内	正常	☒	調整	☐
清掃				
外装	正常	☒	清掃	☐
内部	正常	☒	清掃	☐
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐

交換部品		数量	コメント
吸着筒	交換 ☒	一式	カビ取り作業実施
吸湿筒	交換 ☒	一式	
ドレン用フィルタ	交換 ☒	一個	
オゾン分解触媒	交換 ☒	一個	

2012年 9月 28日

ご署名 上青木中央病院印

内視鏡洗浄機 作業チェックリスト

株式会社IHIシバウラ
環境事業部

日付: 2012年9月28日 作業者 IHIシバウラ 廣中

ONW-10機番: 672

PSA機番: SPS- 6516

客先: 上青木中央病院

様

定期交換部品		
吸着筒と吸湿筒を交換したか (取り外したPSA機番を記入 SPS- 0749)	☒ 合	☐ 否
ドレン用フィルターを交換したか	☒ 合	☐ 否
排水シリコンチューブを交換したか	☒ 合	☐ 否
オゾン分解触媒を交換したか	☒ 合	☐ 否
配管チューブは確実に奥まで差し込んだか 再確認のこと	☒ 合	☐ 否
取付ボルトの締め忘れ・ガタはないか? 確実に取り付いているか	☒ 合	☐ 否
PSA性能確認		
圧力スイッチのゼロ点は合っているか (± 0.005 Mpa以内)	☒ 合	☐ 否
酸素濃度の確認(運転開始から約3分後)(90%以上) (93.5 %)	☒ 合	☐ 否
酸素流量は適切か(0.73~0.82L/min) (0.76 L/min)	☒ 合	☐ 否
PSA圧力の確認 (0.083 Mpa) ~ (0.148 Mpa)		参考値
外装の取付		
オゾンセンサーは配線したか	☒ 合	☐ 否
フロントパネルのランプは配線したか	☒ 合	☐ 否
フロントパネルとサイドパネルの隙間は均等か	☒ 合	☐ 否
ドレンチューブは接続したか	☒ 合	☐ 否
確認事項		
フタパッキンに剥がれはないか	☒ 合	☐ 否
内視鏡接続コネクタのパッキン、Oリングは正常か	☒ 合	☐ 否
洗浄槽・排水パイプ、下部フィルタは清掃したか(汚れある場合清掃)	☒ 合	☐ 否
定期メンテナンスシールに点検日を記入したか	☒ 合	☐ 否
定期点検カウンタをリセットしたか(フィルタリセットスイッチ20秒長押し)	☒ 合	☐ 否
別紙 点検確認書に記録したか	☒ 合	☐ 否
確認試験		
オゾン水濃度の確認(オゾン水インジケータで0.3mg/L以上)	☒ 合	☐ 否
運転は正常か、エラーはでないか	☒ 合	☐ 否
インジケータの変色は良好か	☒ 合	☐ 否

不具合内容・特記事項 (否の場合、Noと共に理由を記入)

カビ除去でカビ取り完了