

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成24年10月4日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	100114	
作業年月日	平成24年10月4日		作業時間	2	Hr
顧客名	斗野病院様		TEL	029-226-6555	
所在地	茨城県水戸市酒門町4887		担当	様	
販売店			担当	様	
納入年月日	平成22年9月29日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	年 回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴

OED-1000 定期保守点検パック作業依頼

不具合原因、作業内容

OED-1000 定期保守点検パック作業実施

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 578
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒ (ペンタックス接続部品)		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

下記記載の定期交換部品の交換実施。性能確認、作動確認実施。
次回点検日は平成25年10月4日頃予定となります。

装置情報	交換後運転回数: 2170 (更新(リセット)実施)・未実施	殺菌: 471	殺菌+7L: 0
	リークチェック: 0	自己洗浄: 107	7L単独: 0
		エア単独: 10	

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ホルン分解触媒		☒	1	ホルンセンサー		☒	1
排水栓		☒	1	コネクタ-継手(本体側)		☒	1
ホルン水濃度計		☒	1	コネクタ-継手(PP2側)		☒	1
濃度計フィルター		☒	1			☐	
		☐				☐	

お客様ご確認署名欄

- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

平成24年10月4日

ご署名 1)~11)

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL: 03-3816-0444

責任技術者

作業者

西野

土屋