

点検確認書

インジケータ確認および定期点検

株式会社 IHIシバウラ
環境事業部

点検担当者： 中澤一裕



点検年月日	平成24年5月15日	機種名	ONW-10	製造機番	001142
設置場所	東京都台東区下谷3-7-3			TEL	03-3871-0822
設置時期	平成18年9月22日	運転回数	1505	御対応者	

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	交換	<input type="checkbox"/>
フィルタリセット釦	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	交換	<input type="checkbox"/>
運転/停止釦	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	交換	<input type="checkbox"/>
アルコールモード釦	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	交換	<input type="checkbox"/>
ランプ類				
操作パネル	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	交換	<input type="checkbox"/>
蛍光灯	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	交換	<input type="checkbox"/>
洗浄動作				
フタロック	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/>
給水	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/>
細管洗浄 順方向	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/>
細管洗浄 逆方向	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/>
細管洗浄 エアページ	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/>
アルコールフラッシュ	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/>
オゾン分解ファン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/>
排水	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/>
異常音、振動	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/>
性能確認				
オゾン水濃度	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	濃度：0.57 mg/L	
オゾンインジケータ	正常	<input checked="" type="checkbox"/>		0.074
酸素発生	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	濃度：92.6 % 流量：0.76 L/min 圧力：~0.140 MPa	
水漏れ確認				
装置外	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/>
装置内	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/>
清掃				
外装	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	清掃	<input type="checkbox"/>
内部	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	清掃	<input checked="" type="checkbox"/>
洗浄コネクタ	正常	<input type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/>
洗浄チューブ	正常	<input type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/>

交換部品		数量	コメント
吸着筒	交換 <input checked="" type="checkbox"/>	1	機械性能、インジケータの変色とも異常ありませんでした。
吸湿筒	交換 <input checked="" type="checkbox"/>	1	
ドレン用フィルタ	交換 <input checked="" type="checkbox"/>	1	
オゾン分解触媒	交換 <input checked="" type="checkbox"/>	1	
オゾンセンサー	交換 <input checked="" type="checkbox"/>	1	
	交換 <input type="checkbox"/>		


運転プログラムのバージョンアップに伴い12回運転するとフィルターランプが点滅して清掃時期をお知らせするようになりました。

点検日：平成24年5月15～16日

点検場所：(株) IHIシバウラ 岡山事業所



1：オゾンインジケータ（インジケータ差込部調整前）

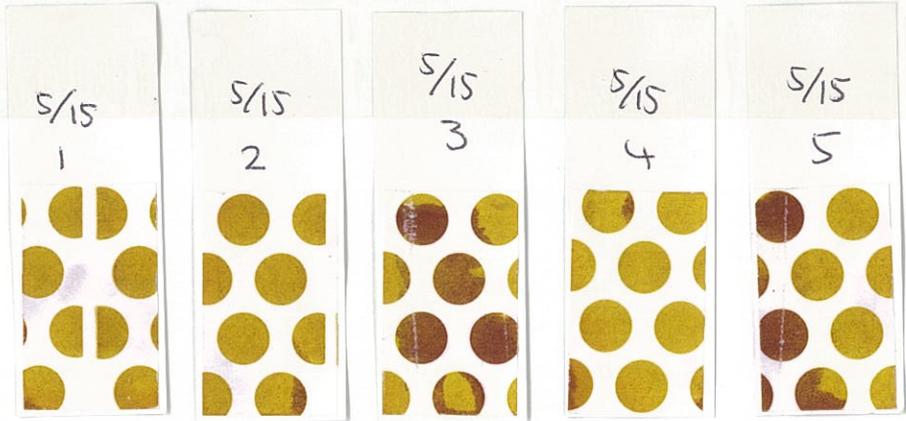

2：オゾンインジケータ（インジケータ差込部調整後）

水滴がインジケータにかかり、変色を阻害する状態が若干改善されました。

オゾン水濃度は正常範囲ですので、様子を見てくださいますよう

お願いいたします。

