

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

02-36669

No. 120820

配 布 先		納 入 先	新鋭工業株式会社 東京支店 殿			機 種	ONW-10
客先	1	所 在 地	千葉県佐倉市上志津原 3 6 - 5			機 番	0 0 0 5 6 7
環営	1						
防品	1						
		ユ-ザ-名	志津南クリニック 様			納 入 日	平成 16 年 11 月 1 日
		点 検 者	中澤一裕	作業時間	5 Hr	受 付 日	平成 24 年 6 月 28 日
		返 送 先	納入先と同じ			出 荷 日	平成 24 年 8 月 8 日
計	3						

修理依頼・苦情内容

エラーH（排水異常）

不具合原因（故障箇所）と処置

〔1〕点検結果（不具合箇所と不具合原因）

下部フィルター～排水ポンプまでの排水経路に詰まりがあり、これが原因でエラーHが発生しました。劣化した部品を交換し、分解清掃して復旧しました。

写真1: 定期交換部品



写真2: 配管、水ポンプ、水位センサー、スプリング



〔2〕修理・点検内容

- 部品交換：下表と写真をご参照ください。
- オゾン水濃度測定：0.36～0.52mg/L・・・正常
- PSA（酸素発生装置）性能点検・・・正常
酸素濃度：92.7% 酸素流量：0.80 L/min 圧力：0.084～0.152 MPa（AC100V, 50Hz）
- 運転確認 異常なし。インジケータ変色 異常なし
- 運転カウンタ：9716

—以上—

承認	交換部品			
審査	部品番号	部品名称	数量	備考
		吸着筒、吸湿筒	1式	
		ドレンフィルター	1個	
		オゾン分解触媒	1個	
		オゾン水系統配管	1式	フタパッキン含む
		フタスプリング	4個	
		水ポンプ（P-3；排水ポンプ）	1台	
		水位レベルセンサー	3本	