

保守点検・修理 報告書

H24 6/28分
(再点検)

管理 No.

発行日 平成24年7月19日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100113
作業年月日	平成24年7月19日		作業時間:	Hr
顧客名	高戸橋 ケリニッ7様		TEL:	03-3200-3060
所在地	東京都新宿区高田馬場2-5-24		担当	浅見 様
販売店			担当	様
納入年月日	平成22年6月23日	保証期間	内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	年 回目	定期点検シート記入 ☒
出張 ☒ 引取	修理 ☐			修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

OED-1000定期メンテナンス作業を H24 6/28 に実施。ホルン水濃度計に不具合があり、一度交換前ホルン水濃度計に戻しました。今回点検・作動確認を実施したホルン水濃度計の再取付作業を致しました。

不具合原因、作業内容

ホルン水濃度計の不具合により、(E108 光量低下注意)が発生しておりました。原因は、ホルン水濃度計のハラン7点灯不良と推測できます。

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 467
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☐ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☒

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

次回点検日 (平成25年7月) 実施予定。

装置情報	交換後運転回数: 6870	更新 (リセット) (実施) ・未実施	殺菌: 1711	殺菌+7L: 313
	リークチェック: 11	自己洗浄: 6	7L単独: 106	エア単独: 373

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解角虫媒	前回交換済	☐		コネクタ系迷子 (本体側)	前回交換済	☐	
排水栓	前回交換済	☐		コネクタ系迷子 (コネクタ側)	前回交換済	☐	
濃度計フィルター	前回交換済	☐				☐	
オゾン濃度計 Assy		☒				☐	
オゾンセンサー	前回交換済	☐				☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

平成24年7月19日
〒169-8501 東京都新宿区高田馬場2-5-24
メゾン・ドール1F

医療法人 財団 綜友会

ご署名 高戸橋 ケリニッ7 印

TEL 03-3200-3060 3 作業者

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL: 03-3816-0444

西野

土屋