

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成28年5月21日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100252
作業年月日	平成28年5月21日		作業時間:	2 Hr
顧客名	若林医院		TEL:	042-362-1611
所在地	東京都府中市片町3-21-1		担当	様
販売店	東邦薬品		担当	様
納入年月日	平成23年5月16日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☒		
☒ 出張 ☐ 引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
排水パイプ内に水漏れ			
不具合原因、作業内容			
保守点検、排水パイプ内の交換及び確認			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 433
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
本体正常			

装置 情報	交換後運転回数: 227	更新（リセット）実施・未実施	殺菌: 2	殺菌+7L: 225
	リークチェック: 0	自己洗浄: 210	7Lコル単独: 0	エア単独: 2

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	オゾンセンサー		☒	1
排水栓		☒	1			☐	
オゾン濃度計		☒	1			☐	
吸盤		☒	1			☐	
脱着ホルダー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄		28年 5月 21日
- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 - 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。		
ご署名	若林孝幸	印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL: 03-3816-0444

責任技術者	作業者
西野	豊田