

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

02-36043

No. 121009

配布先	納入先	新鋭工業（株） 東京支店 殿			機種	ONW-10
客先	所在地	神奈川県秦野市堀川173-1			機番	000266
環営	ユーザー名	いいぬまクリニック 様			納入日	平成16年5月28日
防品	点検者	中澤一裕	作業時間	6Hr	受付日	平成24年7月24日
	返送先	納入先と同じ			発送日	平成24年10月4日
計	3					

修理依頼・苦情内容


総合点検契約の最終作業（次回から定期点検契約に切替わります）

不具合原因（故障箇所）と処置

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

定期交換部品の交換および総合点検契約に基づき、性能劣化した部品を交換しました。

写真1：交換部品一式

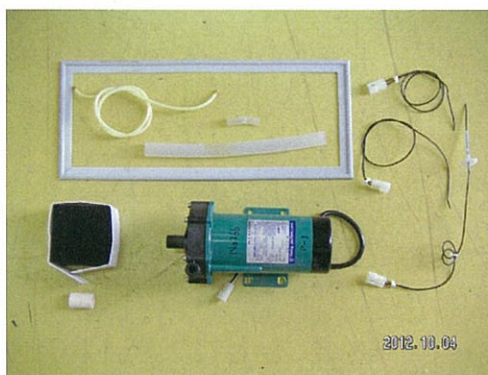

[2] 修理・点検内容

- 内部分解清掃、部品取付作業、定期点検作業
- オゾン水濃度測定：0.45～0.56 mg/L・・・正常
- PSA（酸素発生装置）性能点検・・・正常
酸素濃度：93.3% 酸素流量：0.78 L/min 圧力：0.112～0.194 MPa（AC100V, 50Hz）
- 運転確認 異常なし。インジケータ変色 異常なし

一以上一

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
	オゾン分解触媒	1個	定期交換部品
	ドレンフィルター	1個	定期交換部品
	水ポンプ（P-1）	1台	
	水位レベルセンサー	3本	
	フタパッキン	1枚	
	チューブ類（ドレン、排水、オゾン）	1式	

承認



審査



作成

H24.10.9
中澤