

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成24年8月20日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100090
作業年月日	平成24年8月20日		作業時間:	1.5 Hr
顧客名	植ビルクリニック 様		TEL:	042-549-2171
所在地	昭島市郷地町2-36-8		担当	様
販売店	(有)メダエ高橋 様		担当	様
納入年月日	平成22年7月8日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐	年	回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

OED-1000 定期保守点検パック作業

不具合原因、作業内容

OED-1000 定期保守点検パック作業 実施

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 3P2
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☐	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☐ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

下記交換部品の交換も実施。 作動確認実施。 次回平成25年8月点検実施予定。

装置 情報	交換後運転回数: 8870	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌: 3	殺菌+7L: 202
	リークチェック: 0	自己洗浄: 1	7Lコル単独: 0	エア単独: 2

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解用触媒		☒		コネクトホース(本体側)		☒	
排水栓		☒		コネクトホース(コネクト側)		☒	
濃度計フィルター		☒				☐	
オゾン濃度計 Assy		☒				☐	
オゾンセンサー		☒				☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

24 年 8 月 20 日

ご署名

金子

監印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL: 03-3816-0444

責任技術者

作業者

西野

土屋