

川口クリニック

御中

点検確認書

株式会社 IHIシバウラ
環境事業部

点検担当者：

佐藤

点検年月日	H24年 9月 14日	機種名	ONW-10	製造機番	000494
設置場所				TEL	045-508-0089
設置時期	H16年 6月 18日	使用時間		御対応者	長島

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常	☒	交換	☐
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐
ランプ類				
操作パネル	正常	☒	交換	☐
蛍光灯	正常	☒	交換	☐
洗浄動作				
フタロック	正常	☒	調整	☐
給水	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐
アルコールフラッシュ	正常	☐	調整	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐
排水	正常	☒	調整	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐
性能確認				
オゾン水濃度	正常	☒	濃度：	0.4 mg/L
オゾンインジケータ	正常	☒		
酸素発生	正常	☒	濃度：	94.9% 流量：0.79 L/min 圧力：0.097~0.168 MPa
水漏れ確認				
装置外	正常	☒	調整	☐
装置内	正常	☒	調整	☐
清掃				
外装	正常	☒	清掃	☒
内部	正常	☒	清掃	☒
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐

交換部品		数量	コメント
吸着筒	交換 ☐	一式	給水ホース接続部軽微な 漏れ発生する場合があります。 状況が悪化した場合はホース 一式の交換が必要です。
吸湿筒	交換 ☐	一式	
ドレン用フィルタ	交換 ☒	一個	
オゾン分解触媒	交換 ☒	一個	

24年 9月 14日

ご署名 川口クリニック



内視鏡洗浄機 作業チェックリスト

株式会社IHIシバウラ
環境事業部

日付:2012年9月14日

作業者 佐藤

ONW-10機番:000494

PSA機番:SPS-

客先:111Dクリニック

様

定期交換部品		
吸着筒と吸湿筒を交換したか (取り外したPSA機番を記入 SPS-)		合/否
ドレン用フィルターを交換したか		合/否
排水シリコンチューブを交換したか		合/否
オゾン分解触媒を交換したか		合/否
配管チューブは確実に奥まで差し込んだか 再確認のこと		合/否
取付ボルトの締め忘れ・ガタはないか? 確実に取り付いているか		合/否
PSA性能確認		
圧力スイッチのゼロ点は合っているか (±0.005Mpa以内)		合/否
酸素濃度の確認(運転開始から約3分後)(90%以上) (94.9 %)		合/否
酸素流量は適切か(0.73~0.82L/min) (0.79 L/min)		合/否
PSA圧力の確認 (0.097 Mpa) ~ (0.168 Mpa)		参考値
外装の取付		
オゾンセンサーは配線したか		合/否
フロントパネルのランプは配線したか		合/否
フロントパネルとサイドパネルの隙間は均等か		合/否
ドレンチューブは接続したか		合/否
確認事項		
フタパッキンに剥がれはないか		合/否
内視鏡接続コネクタのパッキン、Oリングは正常か		合/否
洗浄槽・排水パイプ、下部フィルタは清掃したか(汚れある場合清掃)		合/否
定期メンテナンスシールに点検日を記入したか		合/否
定期点検カウンタをリセットしたか(フィルタリセットスイッチ20秒長押し)		合/否
別紙 点検確認書に記録したか		合/否
確認試験		
オゾン水濃度の確認(オゾン水インジケータで0.3mg/L以上)		合/否
運転は正常か、エラーはでないか		合/否
インジケータの変色は良好か		合/否

不具合内容・特記事項 (否の場合、Noと共に理由を記入)

1. 近々、ほとんど使用していない事。

給水ホース等に触れたりすると、ホース接続部より、軽微な漏れを起す事有。

(お客様への説明済)

定期メンテナンスシール切ったため、次回点検日ランに日付を記入(お客様へ説明済)