

点検確認書

株式会社 IHI シバウラ
環境事業部

点検担当者: 角 田

点検年月日	平成 24年 10月 16日	機種名	ONW-10	製造機番	00548
設置場所	2F	TEL:	042-983-1660	御対応者	野口 様
設置時期	平成 年 月 日	使用時間			

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常	☒	交換	☐
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐
ランプ類				
操作パネル	正常	☒	交換	☐
蛍光灯	正常	☒	交換	☐
洗浄動作				
フタロック	正常	☒	調整	☐
給水	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 エアバージ	正常	☒	調整	☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐
排水	正常	☒	調整	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐
性能確認				
オゾン水濃度	正常	☒	濃度: 0.4 mg/L	
オゾンインジケータ	正常	☒		
酸素発生	正常	☒	温度: 2.7% 流量: 0.25 L/min 圧力: 0.102 ~ 0.103 MPa	
水漏れ確認				
装置外	正常	☒	調整	☐
装置内	正常	☒	調整	☒
清掃				
外装	正常	☒	清掃	☒
内部	正常	☒	清掃	☒
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐

交換部品	数量	コメント
吸着筒	一式	ふたのネジを戻す。
吸湿筒	一式	
ドレン用フィルタ	一個	
オゾン分解触媒	一個	

H24年10月16日

ご署名 中野 雄幸



※: 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

内視鏡洗浄機 作業チェックリスト

株式会社IHシバウラ
環境事業部

日付: 2012-10-16

作業者 角田

ONW-10機番: 006548

PSA機番: SPS-

客先: 附 腎 医 院

様

定期交換部品		
吸着筒と吸湿筒を交換したか (取り外したPSA機番を記入 SPS-)		合/否
ドレン用フィルターを交換したか		合/否
排水シリコンチューブを交換したか		合/否
オゾン分解触媒を交換したか		合/否
配管チューブは確実に奥まで差し込んだか 再確認のこと		合/否
取付ボルトの締め忘れ・ガタはないか? 確実に取り付けしているか		合/否
PSA性能確認		
圧力スイッチのゼロ点は合っているか (0.01)		合/否
酸素濃度の確認(運転開始から約5分後)(90%以上) (92.7 %)		合/否
酸素流量は適切か(0.73~0.82L/min) (0.75 L/min)		合/否
PSA圧力の確認 (0.178 Mpa) ~ (0.103 Mpa)		参考値
外装の取付		
オゾンセンサーは配線したか		合/否
フロントパネルのランプは配線したか		合/否
フロントパネルとサイドパネルの隙間は均等か		合/否
確認事項		
フタパッキンに割がれはないか		合/否
内視鏡接続コネクタのパッキン、Oリングは正常か		合/否
洗浄槽・排水パイプ、下部フィルタは清掃したか(汚れある場合清掃)		合/否
定期メンテナンスシールに点検日を記入したか		合/否
定期点検カウンタをリセットしたか(フィルタリセットスイッチ20秒長押し)		
確認試験		
別紙 点検確認書に記録したか		合/否
オゾン水濃度の確認(0.3mg/L以上)		合/否
運転は正常か、エラーはでないか		合/否
インジケータの変色は良好か		合/否

不具合内容・特記事項 (否の場合、Noと共に理由を記入)

この用紙は作業者の控え。
客先には点検確認書のコピーを渡すこと