

修理報告書（引取り修理）

修理依頼番号

No. 121101

配布先	納入先	新鋭工業株式会社 東京支店 殿		機種	ONW-10
客先	所在地	千葉県佐倉市上志津原36-5		機番	000567
環営	ユーザー名	志津南クリニック 様		納入日	平成16年11月1日
	点検者	中澤一裕	作業時間	受付日	平成24年10月
	返送先	納入先と同じ		出荷日	平成24年10月30日
計	2				

修理依頼・苦情内容

水漏れ（水槽亀裂）

不具合原因（故障箇所）と処置

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

洗浄槽の底部に亀裂が発生して水漏れしました。（写真1、2）
亀裂の原因は推定になりますが、経年劣化や疲労によるものではなく、落下などの衝撃により、水槽に大きな力が加わり割れたものと思われます。

写真1:水槽補修前

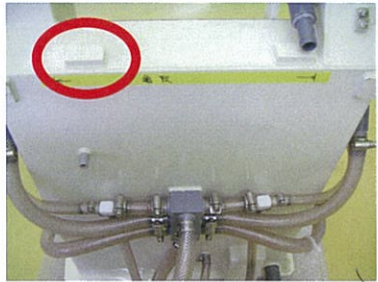


写真2:亀裂部拡大


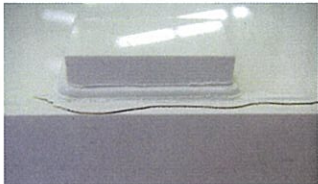


写真3:水槽補修後

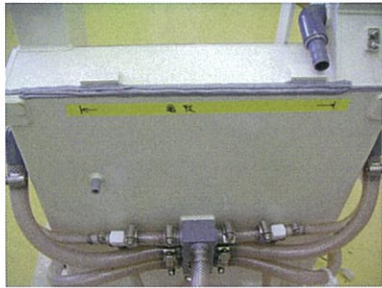

[2] 修理・点検内容

- 1. 水槽補修
- 2. オゾン水濃度測定：0.36～0.52mg/L・・・正常
- 3. P S A（酸素発生装置）性能点検・・・正常
酸素濃度：92.1 % 酸素流量：0.78 L/min 圧力：0.105～0.189 MPa（AC100V, 60Hz）
- 4. 運転確認 異常なし。インジケータ変色 異常なし
- 5. 運転カウンタ：9966

一以上一

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考

承認



審査



作成

H24.11.1
中澤