

修理報告書（引取り修理）

修理依頼番号	02-35575	No. 121129
--------	----------	------------

配 布 先		納 入 先	新鋭工業株式会社 東京支店			殿	機 種	ONW-10	
客先	1	所 在 地	神奈川県茅ヶ崎市南湖 5-20-10			機 番	000352		
環営	1								
		ユーザ名	オアシスクリニック			様	納 入 日	――	
		点 検 者	小野定之	作業時間	4 H r	受 付 日	平成 24 年 9 月 20 日		
		返 送 先	納入先と同じ			出 荷 日	平成 24 年 11 月 6 日		
計	2								

修理依頼・苦情内容

異音がする。

不具合原因（故障箇所）と処置予定

〔1〕点検結果（不具合箇所と不具合原因）

異音は水ポンプ（P-1とP-2）の性能劣化が原因でした。
この他に定期交換部品の交換を実施しました。

写真1：水ポンプ

写真2：定期交換部品一式



〔2〕修理・点検内容

- 部品交換：下表と写真をご参照ください。
- オゾン水濃度測定：0.60～0.64mg/L・・・正常
- PSA（酸素発生装置）性能点検・・・正常
酸素濃度：92.1% 酸素流量：0.78 L/min 圧力：0.078～0.148MPa（AC100V、50Hz）
- 運転動作確認・・・正常
- オゾンインジケータ変色・・・正常

—以上—

承認



審査

H24. 11. 29
中澤

作成

H24. 11. 6
小野

推奨 交換 部品

部品番号	部品名称	数量	備考
762301130	水ポンプ（P-1）	1台	オゾン水製造ポンプ
762301130	水ポンプ（P-2）	1台	内視鏡洗浄ポンプ
762301130	水ポンプ（P-3）	1台	排水ポンプ
762280780	松本用2年目定期交換部品	1式	
	・PSA吸着筒、吸湿筒		
	・ドレンフィルター、オゾン分解触媒		
762231680	排水シリコンチューブ	1本	