

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

02-35811

No. 121121

配布先	納入先	新鋭工業株式会社 東京支店 殿			機種	ONW-10
客先	所在地	神奈川県横浜市ひばりが丘7-10			機番	000169
環営	ユーザー名	湘南すずきクリニック 様			納入日	平成17年10月22日
	点検者	小野定之	作業時間	3Hr	受付日	平成24年06月08日
	返送先	納入先と同じ			出荷日	平成24年11月21日
計						

修理依頼・苦情内容

異音（エア噛音）

不具合原因（故障箇所）と処置予定

〔1〕点検結果（不具合箇所と不具合原因）

水ポンプが性能劣化して大きな音（エア噛音）を発生したので交換いたしました。
併せて定期交換部品を交換しました。

写真：定期交換部品および
水ポンプ（P-1）
排水チューブ



〔2〕修理・点検内容

- 部品交換：下表と写真をご参照ください。
- オゾン水濃度測定：0.49～0.53mg/L・・・正常
- PSA（酸素発生装置）性能点検・・・正常
酸素濃度：91.0％ 酸素流量：0.81 L/min 圧力：0.82～0.149MPa（AC100V、50Hz）
- 運転動作確認・・・正常
- オゾンインジケータ変色・・・正常

—以上—

承認



審査

H24.11.29
中澤

作成

H24.11.21
小野

推奨 交換 部品

部品番号	部品名称	数量	備考
	吸着筒、吸湿筒	1式	定期交換部品
	ドレンフィルター	1個	定期交換部品
	オゾン分解触媒	1個	定期交換部品
	オゾン水系統配管	1式	
	水ポンプ（P-1）	1個	オゾン水製造用ポンプ