

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成24年10月19日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100193
作業年月日	平成24年10月19日		作業時間:	hr
顧客名	越川ワニニッ7様		TEL:	0478-55-8030
所在地	千葉県佐原市北1-10-3		担当	様
販売店	株式会社 成田支店		担当	鈴木 様
納入年月日	平成22年10月21日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

OED-1000 定期保守点検パック作業依頼, 異常内容確認

不具合原因、作業内容

OED-1000 定期保守点検パック作業実施。

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☐
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バッテリ数 324
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 2.69 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☐ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☐ (ビニール有)	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

作動確認、性能確認実施。

次回点検日は平成25年10月予定となります。

装置情報	交換後運転回数: 932 → 0 (更新) (リセット) 実施・未実施	殺菌: 582	殺菌+7L: 1179
	リークチェック: 220	自己洗浄: 352	7Lコール単独: 0
			エア単独: 6

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ホソ分解触媒		☒	1	ホソセンサー		☒	1
排水栓		☒	1	コネクター継手(排水側)		☒	2
濃度計フィルター		☒	1	吸パン		☒	3
ホソ濃度計		☒	1			☐	
コネクター継手(本体側)		☒	2			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

平成24年10月19日

ご署名 越川ワニニッ7様 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL: 03-3816-0444

責任技術者	作業者
西野	土屋